



## Bedienungsanleitung Pflegebett Melanie

Wir montieren Ihnen Ihr Comodo oder Melanie Pflegebett vor Ort. Anschließend erklären wir Ihnen die Möglichkeiten und Funktionen des Bettes. Das Bett ist komplett ausgerüstet mit Aufzugstange, Triangelgriff und integrierten Seitengittern.

**Die Fusshochlage** wird manuell betätigt durch Anheben des Fussteiles. Die Arretierung der Fusshochlage kann durch nochmaliges Anheben wieder abgesenkt werden. Sie können die Fusshochlage so in jede beliebige Höhe bringen und dort belassen.

**Die Mobilität** Da das Bett auf Rollen steht, können sie das Pflegebett auch verschieben. Lösen Sie dazu die Einzelradbremse und achten Sie darauf, dass das Elektrokabel genügend Länge für den Verschiebeweg hat, bzw. nirgends eingeklemmt noch vom Bett überfahren wird.

**Die Seitenteile** Diese können Sie anheben und in oberster Position einklappen. Um diese wieder abzusenken betätigen sie die Auslöseknöpfe in den Fuss- und Kopfteilen und heben sie gleichzeitig die Stange etwas an. Bitte die Stangen sorgfältig nach unten schieben und nicht fallen lassen.

**Die Bremsen** Jedes Rad kann durch einfaches Hinunterdrücken des Bremsplättchens am jeweiligen Rad blockiert werden. Achtung: Nicht mit blanken Füßen betätigen. Verletzungsgefahr!!!

**Störungen** Schauen sie zuerst ob der Netzstecker in der Steckdose steckt, bzw. ob das Handschaltgerät am Liegeflächenmotor eingesteckt ist. Achten sie dann darauf, ob nirgends ein Kabel ausgerissen ist. Wenn sie den Fehler nicht selbst beheben können rufen Sie uns an. Bei Störungen, Defekten oder aussergewöhnlicher Geräusentwicklung, rufen Sie uns an. Telefonnummer 0848 10 20 40.

**Achtung wichtig!** Das Untergestell des Bettes sollte stets sauber gehalten und von Zeit zu Zeit abgestaubt werden. Staub kann sich entzünden! Vor dem Reinigen unbedingt den Stecker aus der Steckdose ziehen. Reinigung mit trockenem Abstaubtuch.

