




Montage- und Bedienungsanleitung für THERAPIETISCH 5 KVS - K, 8 - K, 8XXL - K c €

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0801

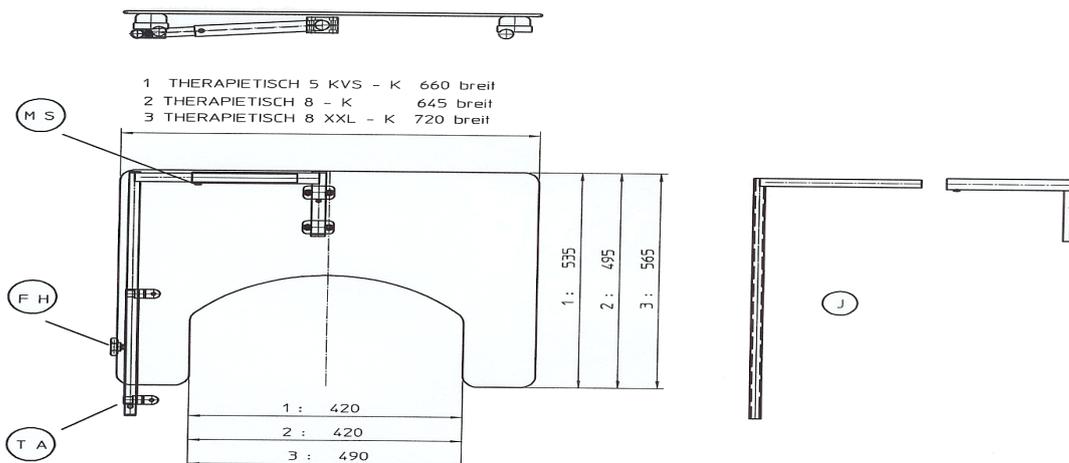

1. Montieren sie das gemäß ihren Angaben bereits vormontierte Therapietisch-Aufnehmerrohr (TA) unter der rechten oder linken Armlehne. Die Montageabfolge richtet sich nach dem entsprechenden Rollstuhl-Modell.
2. Sorgen Sie für eine absolut saubere, möglichst weiche Montageunterlage. Denken Sie bitte daran, dass Kleinteile, Splitter, Späne und ähnliches die Therapietisch - Platte verkratzen können.
3. Ist dieses Aufnehmerrohr fest montiert, schieben sie den Therapietisch mit der Verstellhalterung (J) in das Aufnehmerrohr. Zur Arretierung dient das Feststell-Handrad (FH).
4. Mit der Madenschraube (MS) können sie den Therapietisch den Bedürfnissen entsprechend ausrichten.
5. Der Therapietisch ist jetzt optimal montiert und evtl. Verletzungen durch überstehende Schrauben sind völlig ausgeschlossen.
6. Entfernen Sie von der Platte die beidseitigen Schutzfolien.
7. Zur bestmöglichen Armlagerung, z. B. bei einer Halbseitenlähmung kann der Therapietisch auch (abhängig von der Größe) asymmetrisch montiert werden, so dass auf der einen Seite ein größerer Überstand entsteht, als auf der anderen.
8. Zum Abklappen des Therapietisches lösen sie das Feststell-Handrad (FH), ziehen den Tisch vorsichtig so weit wie erforderlich nach vorn, um ihn dann seitlich abzuklappen. Soll der Therapietisch wieder benutzt werden, verfahren sie bitte umgekehrt.
9. Wenn sie den Therapietisch gemäß dieser Montageanleitung montiert haben und auch die Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisations-Hinweise wie beschrieben befolgen, werden sie viele Jahre lang Freude an diesem praktischen Therapietisch haben.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden Therapietisches und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung erfolgen.

Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegeanleitung für



Reinigung

Reinigen Sie den Therapietisch mit lauwarmem Wasser unter Zusatz eines neutralen Spülmittels oder mit einem auf dem Markt erhältlichen Kunststoffreiniger. Verwenden Sie dafür ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein Fensterleder.

Desinfektion und Sterilisation

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
MPB - Therapietische aus PET-G zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus. Sie sind gemäß FDA - Richtlinie zugelassen für Lebensmittel-Anwendungen.

Eine Desinfektion der Tischplatte und der Haltewinkel kann mit allen für Kunststoffe und Edelstahl zugelassenen Desinfektionsmitteln erfolgen. Darüber hinaus sind die Tischplatten resistent gegen Benzin, Ethanol, Glyzerin und Terpentin. Vermieden werden sollten in jedem Falle Aceton, Ammoniak, Toluol, Essigsäure, Methanol, sowie Verbindungen daraus.

Die **Tischplatte** selbst ist darüber hinaus sogar **sterilisierbar**.

Kratzer

Kleine Oberflächenkratzer sind leicht mit einer Heißluftpistole zu entfernen. Diese Bearbeitung sollte aber in jedem Falle von einem Fachmann ausgeführt werden.



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Könizstrasse 227, 3097 Liebefeld
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch