

GEBRAUCHSANWEISUNG

Toilettenstuhl Modell 9042



TECHNISCHE ANGABEN

Gesamthöhe:	90 cm
Sitzhöhe:	51 cm
Breite:	58 cm
Sitzbreite:	46 cm
Rückenlehnenhöhe:	44,5 cm
Tiefe:	56 cm
Gewicht:	ca. 15 kg
Max. Belastung:	100 kg

LIEFERUMFANG

- Toilettenstuhl + gepolsterter Sitzbrille
- gepolsterte Abdeckplatte
- Toiletteneimer mit Deckel
- Gebrauchsanweisung

ANWENDUNGSGEBIET

Mobile, wiederverwendbare, faltbare Toiletteneinrichtung. Nicht zu verwenden als Duschstuhl, Ablage, Leiter oder zum Überstellen von fest installierten Toiletten.

AUFBAUANLEITUNG

Stellen Sie sich seitlich neben den geklappten Stuhl. Klappen Sie den Stuhl – nur mit der Hand am oberen Rand des Rückenkissens und mit der anderen Hand am vorderen Ende des Sitzkissens – auseinander und vergewissern Sie sich, dass alle vier Füße des Stuhls auf ebener Fläche stehen. Die Armlehnen können jetzt nach unten geklappt werden. Der Toiletteneimer lässt sich nun von hinten in die Führungsschienen unterhalb der Sitzbrille einführen. Zur Abdeckung der Sitzbrille wird eine gepolsterte Sitzauflage mitgeliefert, die bei Nichtbenutzung des Stuhls aufgelegt werden kann.

Zum Zusammenklappen verfahren Sie umgekehrt.

- ! Toiletteneimer vor dem Falten entnehmen.
- ! Beim Klappen des Stuhls auf Scherung achten – Verletzungsgefahr

TIPP: Füllen Sie in den oberen Rand des Toiletteneimers ein wenig Wasser. Durch Aufsetzen des Deckels wird der Eimer geruchsdicht verschlossen.

SICHERHEIT

- ! Beim Auf- und Abbau des Stuhles bitte auf Quetschung und Scherung achten – Verletzungsgefahr !
- ! Greifen Sie seitlich nicht weiter als die Länge Ihres Armes es zulässt, da sonst Kippgefahr besteht.
- ! Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Schraubverbindungen auf Ihre Festigkeit.
- ! Heben Sie den Stuhl nicht an den Armlehnen hoch. Diese sind abklappbar und können beim Hochheben Verletzungen oder Schäden verursachen.
- ! Lehnen Sie sich nicht zu weit nach vorne aus dem Stuhl – Kippgefahr !
- ! Vor dem Transport des Stuhls ist der Eimer zu entnehmen.
- ! Reparaturen und Desinfektion nur von autorisierten Personen !
- ! Entleeren Sie den Eimer nach jeder Nutzung.

PFLEGE

Sitzpolster, Armpolster, Rahmen und Toiletteneimer lassen sich mit schonenden Haushaltsreinigern und einem feuchten Tuch pflegen. Verwenden Sie keine Bürsten oder andere scharfkantige Reinigungswerkzeuge.

Chromteile sollten von Zeit zu Zeit mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Bei stärkerer Verschmutzung helfen milde Chrompolituren. Gelenkverbindungen sollten leicht gefettet sein.

- ! Behandlungen mit Heißstrahl- und Hochdruckgeräten sind nicht zulässig.

WARTUNG

Der Toilettenstuhl ist wenigstens alle zwei Jahre von autorisierten Personen Fachhändler zu überprüfen, jedoch mindestens vor jedem Wiedereinsatz. Folgende Parameter müssen geprüft werden:

- Prüfung der Rahmenteile auf plastische Verformung und Funktionseinbußen
- Sichtprüfung auf Lackschäden (Korrosionsgefahr)
- Prüfung aller Schraubverbindungen auf Festigkeit und Funktion
- Funktionsprüfung der Armlehnen (Klappung, Belastung, Verformung, Verschleiß durch Belastung)
- Zustandsprüfung der Polster (Risse, spröde Stellen, Durchfeuchtung)
- Dichtigkeit WC-Eimer (nicht bei Wiedereinsatz)
- Lieferzustand vollständig ?
- Gebrauchsanweisung vorhanden ?

Lassen Sie sich die Wartung nur dann im Serviceplan bestätigen, wenn mindestens die zuvor genannten Profile überprüft wurden. Sollte Ihr Fachhändler auf Ihr Verlangen hin keine Wartungen durchführen, setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Gerne nennen wir Ihnen autorisierte Fachhändler in Ihrer Nähe.

DESINFEKTION

Alle am Stuhl befindlichen Teile können durch eine Scheuerdesinfektion behandelt werden. Grundsätzlich werden alle Oberflächen eines Systems oder eines Produktes vor der Weitergabe an einen anderen Nutzer desinfiziert (Wiedereinsatz).

- ! Die Anwendung von Desinfektionsmitteln unterliegt autorisiertem Fachpersonal, das auf die Funktionsweise und Anwendung geschult worden ist.
- ! Verwenden Sie geeignete Schutzkleidung, da die Desinfektionslösung bei Hautkontakt Reizungen auslösen kann. Achten Sie hierfür auch auf die Produktinformationen der jeweiligen Lösungen.
- ! Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung der Desinfektion entstanden sind, unterliegen nicht der Haftung des Herstellers.

Verwenden Sie nur Desinfektionsmittel die in der aktuellen Auflistung des Robert-Koch-Institutes und das validierte Verfahren der Scheuer- oder Wischdesinfektion. Der aktuelle Stand der in die RKI-Liste aufgenommenen Desinfektionsmittel kann beim Robert-Koch-Institut (RKI) nachgefragt werden (Homepage: www.rki.de).

Toiletteneimer und gepolsterte Sitzbrille sind für die hygienische Aufbereitung nicht vorgesehen.

Ersatzteile erhältlich über Ihren Fachhändler.

SERVICEPLAN

Der Toilettenstuhl wurde überprüft:

Händlerstempel:

Datum:

Händlerstempel:

Datum:

Händlerstempel:

Datum:

Hersteller:

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
VERMEIREN N.V.
Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout

Vertrieb:



VERMEIREN
Deutschland GmbH

Wählerstr. 12a · 40472 Düsseldorf
Tel.: 0211/942790 · Fax: 0211/653600



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Könizstrasse 227, 3097 Liebefeld
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch