

# Pflegewanne MK Fantasy

Installationszeichnung 01



**Kuhn und Bieri AG**

Sägestrasse 75, 3098 Köniz  
Telefon 0848 10 20 40  
Fax 031 970 01 71  
info@kuhnbieri.ch

[kuhnbieri.ch](http://kuhnbieri.ch)

## Bauseitige Anschlüsse

- 1 : KW ½" 4–6 bar  
(Anschluss durch flexible Druckschläuche)
- 2 : WW ½" 4–6 bar  
(Anschluss durch flexible Druckschläuche)
- 3 : Wandablauf DN50 (Aussendurchmesser 56)
- 4 : Elektroanschluss Normsteckdose Unterputz  
230V 50Hz  
Abgesichert B 10A Automat  
Fehlerstromschutzschalter 30 mA  
Potentialausgleich

Alle Massangaben in mm


**Sämtliche Leitungen oder Kabel müssen in der Wand versenkt sein. Keine abstehenden Leitungen!**

**Eine Absperrung der Warm- und Kaltwasserleitungen in den Räumlichkeiten ist dringend erforderlich!**

**Bei Nichteinhaltung der Masse ist eine fachgerechte Installation nicht möglich und die Unkosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt.**

**An der Montagefläche des Hubgestells dürfen keine Sockel- oder Hohlkehlfiesen sein!**

**Es dürfen keine Leitungen hinter dem Pult/Unterkonstruktion verlegt werden!**

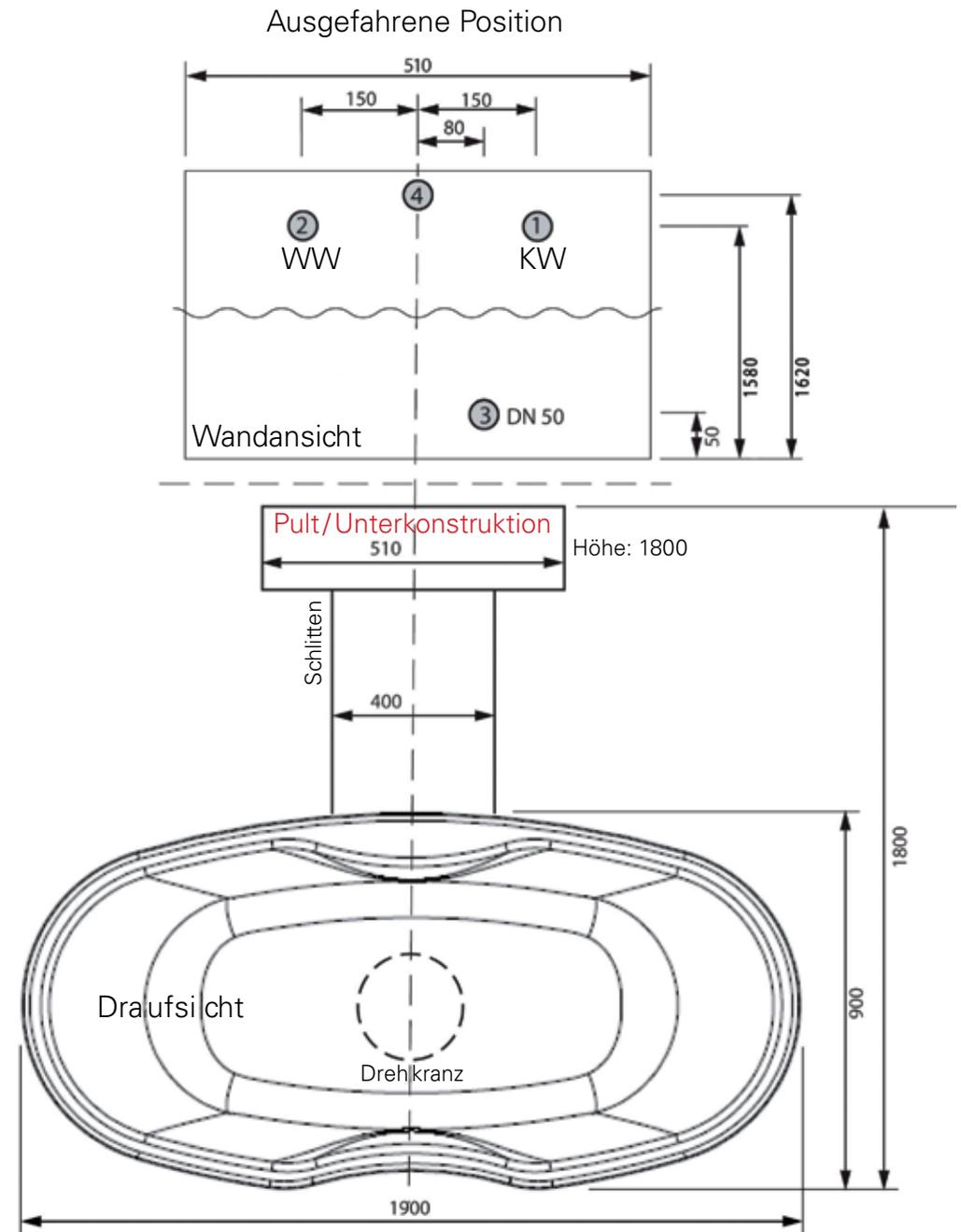

# Pflegewanne MK Fantasy

Installationszeichnung 02




**Kuhn und Bieri AG**

Sägestrasse 75, 3098 Köniz  
Telefon 0848 10 20 40  
Fax 031 970 01 71  
info@kuhnbieri.ch

[kuhnbieri.ch](http://kuhnbieri.ch)

Ausgefahrene Position  
mit 90° Drehung

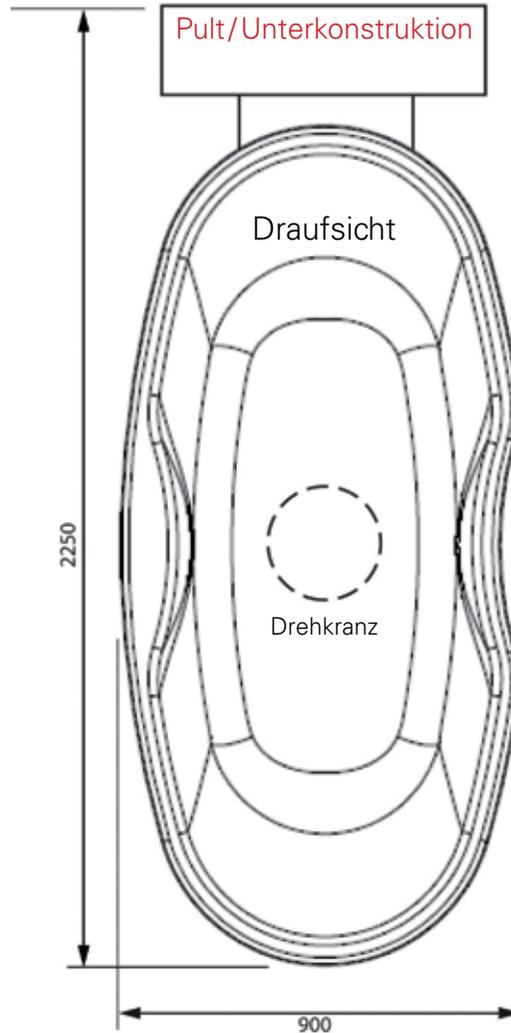

Eingefahrene Position

