


GEBRAUCHSANWEISUNG: M2-GAS-TIP DUSCH/TOILET.STUHL.
 Stuhl ist geeignet für Personen beim Baden/Duschen und Toilettenbesuch. (1/3)

KIPPEN:

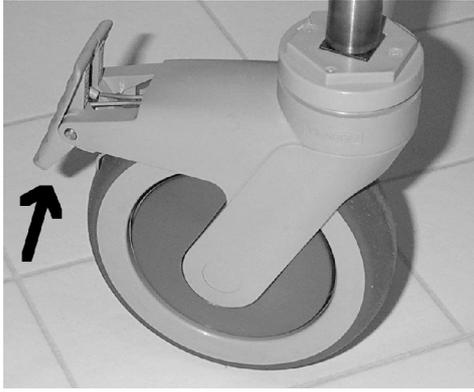


Bevor der Stuhl gekippt wird, müssen auf alle 4 Räder mit einem Druck nach unten auf der Bremse, geschlossen werden.

KIPPEN:



Der Stuhl wird gekippt, wenn man um die Handgriffe greift und mit dem Daumen auf die Querstange. Dabei kann man gleichzeitig den Handgriff zur Gasfederung betätigen, und auf und ab kippen. Sofern der Benutzer nicht selbst imstande ist an den Armlehnen festzuhalten, muss der Helfer, bevor der Stuhl gekippt wird, die Hände des Benutzers im Schoß legen

HÖHENREGULIERUNG:

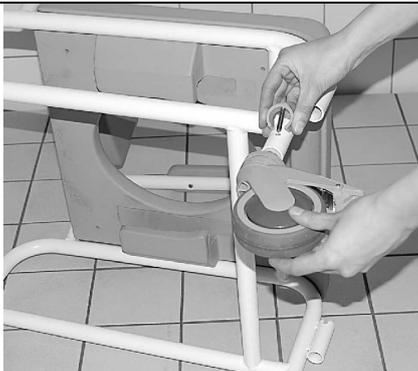


1. ALLE 4 RÄDER SCHLIESSEN (DURCHN EINEM DRUCK AUF DER GRAUEN PLATTE AN DEN RÄDERN)
2. STUHL HINLEGEN
3. CLIPS BEI DEM RAD HERAUSNEHMEN DAS REGULIERT WERDEN MUSS
4. MAN GREIFT UM DAS RAD UND ZIEHT, BIS MAN BEI DEM LOCH IN DER GEWÜNSCHTEN HÖHE IST. CLIPS WIEDER HINEIN SETZEN (PS! MAN MUSS SICH SICHEREN DAS DER CLIPS GANZ DURCHGEDRÜCKT IST)
5. DER PROZESS WIEDERHOLT SICH BEI DEN ÜBRIGEN RÄDERN (DEN STUHL WIEDER UMDREHEN UM DIE HÖHE BEI DEM „UNTERSTEN“ RÄDERN ZU REGULIEREN.)
6. ALLE 4 RÄDER MUSS IN DERSELBE HÖHE EINGESTELLT WIRD

AUSLÖSUNG ARMLEHNE:




Das Schnappschloss wird durch ziehen ausgelöst und danach kippt die Armlehne.

RÜCKENREGULIERUNG:

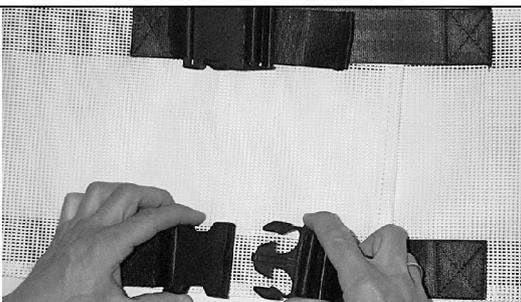

Rücken öffnet sich, wenn man mit der linken Hand die 2 Plastikknöpfe reindrückt und mit der rechten Hand die Steckspanne herauszieht.

RÜCKENREGULIERUNG:

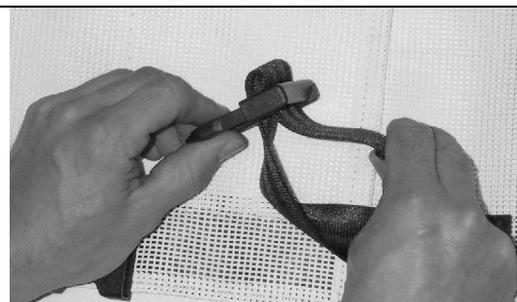


Die Tiefe des Rückens wird wie folgt reguliert: Den Gurt rücken und danach wieder zustraffen.
 Waschen vom Rücken: Waschen bei Max. 80 grad.

FORTSETZUNG AUF SEITE 2

GEBRAUCHSANWEISUNG: M2-GAS-TIP DUSCH/TOILETSTUHL

Stuhl ist geeignet für Personen beim Baden/Duschen und Toilettenbesuch. (2/3)

VERWENDUNG VON FUSSTÜTZEN:

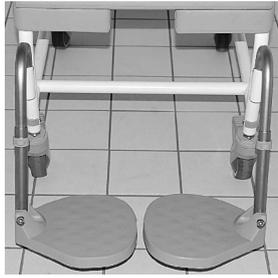


BEIM MONTIEREN VON FUSSTÜTZEN AM TOILETSTUHL
 Die Höhe von den Fußstützen wird durch das Herausnehmen der Clips, danach platziert man die Fußstützen in gewünschter Höhe und zum Schluss setzt man den Clips wieder hinein, reguliert.
 Müssen die Fußstützen zur Seite geschoben werden: Fußstützen leicht anheben und dort hindrehen, wo gewünscht. Wenn wenig Platz benötigt wird, die Fußstütze kippen.

WADENSTÜTZEN REGULIERUNG:



Die Wadenstützen werden mit Klettenverschluss auf der Rückseite befestigt. Die Tiefe der Wadenstützen wird durch festmachen des Klettenverschlusses weiter nach außen oder innen.
 Waschen von Wadenstütze: Waschen bei Max. 80 grad.

REGULIEREN STANDARD NACKENSTÜTZENE (ARTIKEL NR.310221):

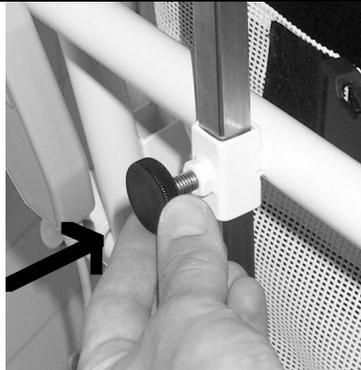


Die Höhe der Nackenstütze wird durch lösen der Fingerschraube erreicht. Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist Fingerschraube wieder fest anziehen.

REGULIEREN DER HÖHEN – UND TIEFEVERSTELLBAREN NACKENSTÜTZE (ARTIKEL NR. 310222)




Höhe – und Tiefe der Nackenstütze wird mit lösen der zwei Fingerschrauben erreicht. Wenn gewünschte Position erreicht ist Fingerschraube wieder fest anziehen.

REGULIEREN DER SEITENSTÜTZEN:

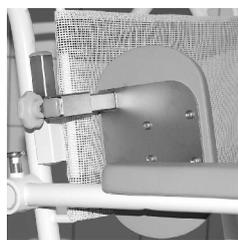

Seitenstützen werden in den viereckigen Röhre am Stuhlgestell einrasten. Die Tiefe wird durch lösen und anziehen der Fingerschraube reguliert. Es kann auch so befestigt werden, dass das Kissen waagrecht wendet, wenn dafür bedarf ist

VERWANDUNG VON M2 STUHL

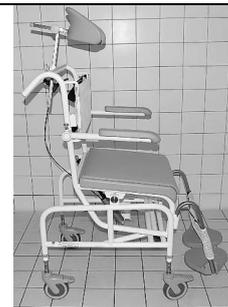

Gebrauch des Stuhls in einer negativ Position, ist eine Gefahr, daß Benutzer kann nach vorn fällt.



Wenn man abmontieren der Eimer vom Stuhl, ist es wichtig, dass man gerade nach hinten, entlang der Sitze schieben. Andernfalls kann es sehr schwierig sein, zu abmontieren der Eimer vom Stuhl.

Übriges Zubehör, wie Eimer usw. sehe bitte Broschüre
 FORTSETZUNG AUF SEITE 3

GEBRAUCHSANWEISUNG: M2-GAS-TIP DUSCH/TOILETSTUHL

Stuhl ist geeignet für Personen beim Baden/Duschen und Toilettenbesuch. (3/3)

Check with proper intervals the fastening of the wheels to the legs.

<p style="text-align: center;">Artkl. Nr. 310201/310202 Max. Belastung Max. 140 Kg. PS! CLIPS bei Höhenverstellung ganz rein schieben. 2 Jahre Reklamations-recht ang. Fabrikationsfehler.</p>	<p style="text-align: center;">Reinigen: Beim Desinfizieren Kann angewendet werden: Ethanol und Propanoll Auflösung. Oder gewöhnliches vorkommendes nicht-alkoholisieretes Reinigungsmittel Max. 70 grad Betreffs Rücken und Wadenstütze: sehe unter dem Bild</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CE</div> <p style="text-align: center;">18-12-07</p>
--	--

Artikel Nr.:	Ersatzteile für M2 –GAS-TIP Dusch/Toilettenstuhl	
310340	Sitz, grau	Artikel Nr.: GAS-FEDER TEILE
310342	Intimsitz	310265 Gas – Feder
310341	Deckel (std., grau)	310266 Bremsenhandgriff
310343	Deckel (intim, grau)	310267 Bremskabel
800181	Grau p. u. Schaumkissen für Armlehne. Ein Stück. Grau	310268 Schließmechanismus(zur Montierung von Bremskabel an Gasfeder)
310252	Rücken (weiß Plastik Netz)	310262 Bolzen mit Mutter zur Befestigung von Gasfeder (bei Spitze)
310065	Clips zur Höheneinstellung	310263 Bolzen zur Befestigung von Gasfeder (beim Boden)
800265	125 mm Räder mit montiertem Teleskopbein. 1 stück für Gas-tip (nach Oktober 07)	
800266	125mm Räder mit montiertem Teleskopbein. Set mit 4 stück für Gas-tip (nach Oktober 07)	
800264	100mm Räder mit montiertem Teleskopbein. Set mit 4 stück für Gas-tip (nach Oktober 07)	
310081	Finger schraube für Nackenstützen- Halter	
800244	Grau plastik zwingen für Handgriff/Runde Armlehne/200 kg Armlehne	
800244	Schnappschloss für Armlehne	
800014	Armlehne set	

Sollten sie noch fragen haben sind sie jeder zeit willkommen mit uns Kontakt aufzunehmen.

MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN

HMN a/s

Midtager 22, 2605 Brøndby, Dänemark

Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax. +45 43 96 26 92 E-mail info@hmn.dk

www.hmn.dk



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch