


TAiMA

Rückenbügel / Backrest Std. / Komfort




Entfernen Sie die Befestigungsschraube des Bremshebels (M5 x 35mm) mit einem Kreuzschlitz - Schraubendreher.

Remove the screw that attaches the brake lever (M5 x 35mm) with a Phillips head screwdriver.

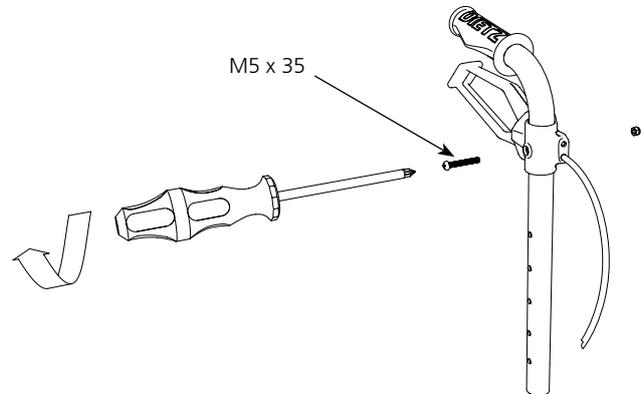


Befestigen Sie nun den Rückengurt, zusammen mit dem Bremshebel mit der mitgelieferten, längeren Schraube (M5 x 45mm) und abgerundeten Scheibe.

You can now attach the backrest together with the brake lever with the long screw (M5 x 45mm) and domed washer.

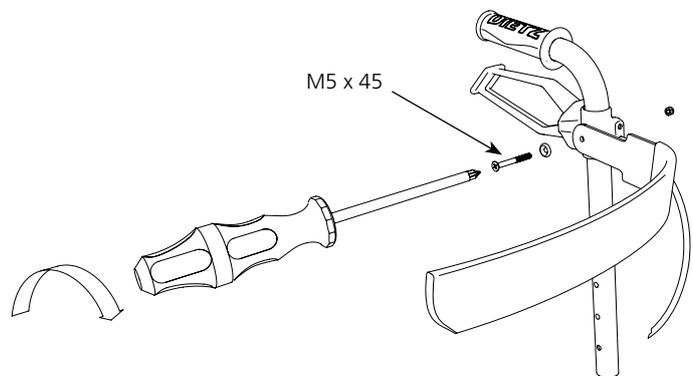

Befestigen Sie Rückengurt und Bremshebel entsprechend auf der anderen Seite, und versichern Sie sich, dass alle Schraubverbindungen wieder fest angezogen sind. Überprüfen Sie auch die Bremsen auf einwandfreie Funktion.

Repeat the procedure accordingly on the other side and make sure that after finishing the job all connecting screws are correctly tightened and the brakes work properly.

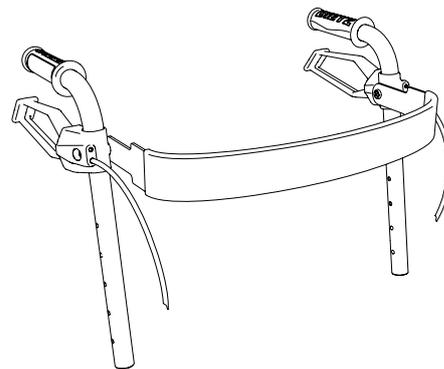

Reinigung

Der Rückengurt kann mit lauwarmem Wasser gereinigt werden. Zur Desinfektion verwenden Sie bitte ausschließlich alkoholbasierte Produkte. Verwenden Sie niemals alkoholbasierte Produkte in Verbindung mit Wasser. Verwenden Sie keine Hochdruck - oder Dampfreiniger.

Cleaning

The Backrest can be cleaned with water. For disinfection please use only alcohol based products. Do never use alcohol based products in combination with water. Do not use steam cleaners.



Kuhn und Bieri AG

Sägestrasse 75 | CH-3098 Köniz
Telefon 0848 102040 | Fax 031 970 01 71 | info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch