



Passend für alle Befeuchterflaschen

Stabiler Metallanschluss für Nasenbrille


Integrierter Griff

Whisper Cap




Tief eingelassenes Flowmeter

Alle 2 Jahre Wechsel des Einlassfilter

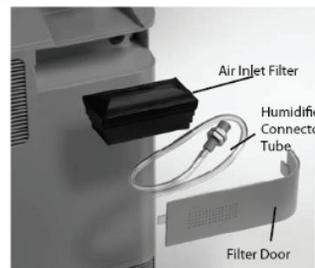

Kompakt und nur 14kg Gewicht

Alarmer

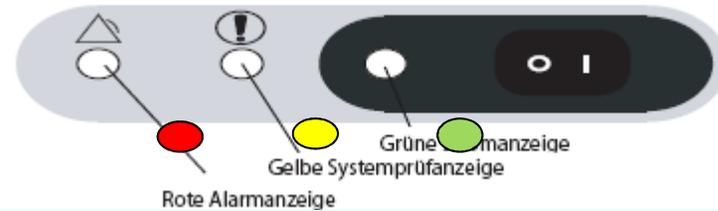

●	Das Gerät ist eingeschaltet und arbeitet einwandfrei.
Nur akustischer Alarm	Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist oder ob es einen Stromausfall gibt.
● ●	Geringe Sauerstoffkonzentration: nutzen Sie das Gerät weiter, verständigen Sie jedoch Ihren medizinischen Fachhändler.
● ●	Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 5 Minuten und schalten Sie das Gerät wieder ein. Bleibt der Zustand erhalten, so schalten Sie das Gerät aus und verständigen Sie Ihren medizinischen Fachhändler.
⊗ ● ●	Schalten Sie das Gerät aus: prüfen Sie ob das Netzkabel eingesteckt ist, prüfen Sie das Sauerstoffeinstellrad, prüfen Sie die Nasenkanüle, prüfen Sie die Verbindung zum Befeuchter.
● ● ●	Schalten Sie das Gerät aus. Nutzen Sie eine alternative Sauerstoffquelle und verständigen Sie Ihren medizinischen Fachhändler.