


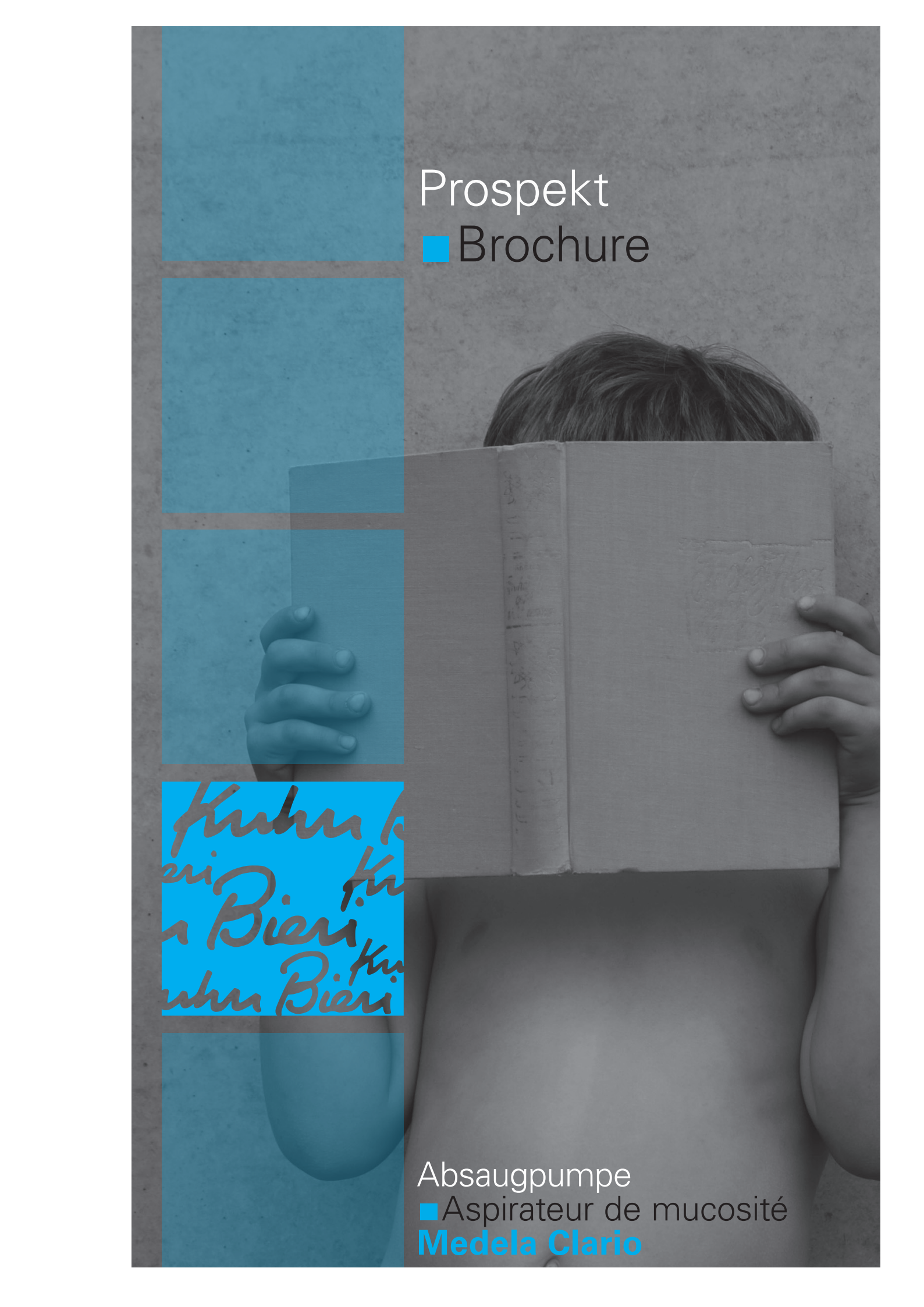

Prospekt

■ Brochure

Kuhner
Bieri
Kuhner
Bieri
Kuhner
Bieri

Absaugpumpe

■ Aspirateur de mucosité

Medela Clario

Clario

Einfache Anwendung und mobiles Absaugen

Sowohl Pflegepersonen als auch Patienten schätzen die Clario aufgrund ihrer raffinierten Technik und ihres durchdachten Designs.

Das modulare Design der Clario besteht aus 3 Hauptteilen und ermöglicht eine einfache Anwendung.

- Motoreinheit
- Behälter
- Sicherheitskammer

Die **Clario** verfügt über 3 voreingestellte Vakuumstufen zur einfachen Anwendung.

Die **Clario** ist sehr hygienisch, da keine Sekrete in die Pumpe eindringen können, was die routinemäßige Reinigung vereinfacht.

Die **Clario** ist schnell einsatzbereit für den nächsten Benutzer und kann aufgrund ihrer Leichtbauweise überallhin mitgenommen werden. Des Weiteren ist sie mit Akku erhältlich, um eine noch größere Mobilität gewährleisten zu können.



- a** Schwimmer verhindert einen Überlauf
- b** Stöpsel für den sicheren Transport
- c** 0,5 L Behälter
- d** Vakuumregler
- e** Sicherheitskammer
- f** LED zur Anzeige des Akkustatus
- g** Griff

Mobilität kombiniert mit hoher Zuverlässigkeit

Die Clario verbindet raffinierte Technik mit durchdachtem Design und Anwenderfreundlichkeit. Die Pumpe besteht aus nur drei Komponenten, die im Handumdrehen zusammengesetzt werden können. Der Absaugschlauch wird am Deckel des Behälters befestigt. Die Clario bietet drei einfach vorzunehmende, unkomplizierte Vakuumeinstellungen. Eine LED auf der AC/DC-Version zeigt an, wann der Akku geladen werden muss. So präsentiert sich die Clario in einem ansprechenden, nicht medizinisch wirkenden und diskreten Design bei einem überraschend niedrigen Geräuschniveau.



Einfache Handhabung

Dreifaches Hygienekonzept

Die Clario verfügt über ein Dreifaches Hygienekonzept. Der Schwimmer beugt einem Überlauf vor, die Sicherheitskammer fängt Sekrete auf, wenn der Schwimmer versehentlich nicht eingesetzt wurde, und die Membrane verhindert das Eindringen von Sekreten in die Pumpe. Zur Reinigung muss das Gerät nicht geöffnet werden und es sind keine Filter erforderlich. Die einfache Reinigung kann eine Kreuzkontamination unter Patienten verhindern.



Einfache Reinigung

Kompakt und tragbar

Die Clario mobilisiert den Benutzer. Die Akku-Version, die nur 2 kg wiegt, verfügt über einen aufladbaren Akku, der eine Absaugdauer von mehr als 50 Minuten ermöglicht. Die optionale Tragetasche für die Clario und ihre Komponenten ermöglicht einen diskreten und bequemen Transport.



Einfacher Transport

Kurzinformationen

- Medizinische Fachkräfte profitieren von Medelas 50-jähriger Erfahrung in der medizinischen Vakuumtechnologie.
- Unser Schweizer Entwicklungs- und Herstellungsprozess zeichnet sich durch mechanische Präzision aus und garantiert exzellente Leistung.
- Besonders in der Pflege zuhause wird die Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit der Clario sehr geschätzt.
- Die Clario bietet ein modernes und dennoch zeitloses Design und wirkt nicht wie ein typisches medizinisches Gerät.
- Die Clario wird von Pflegern wärmstens empfohlen.
- Sie brauchen wenig Zeit und Mühe zur Reinigung.
- Das Dreifache Hygienekonzept der Clario kann eine Kreuzkontamination verhindern.
- Die Clario steigert die Mobilität und somit die Lebensqualität.
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät, 6 Monate Garantie auf den Akku.

Zubehör

Anschluss für 12 VDC IN

Autoanschlusskabel zum Betrieb im Auto.



Manometer

zur Kontrolle der Vakuumeinstellung.



SoftCase Tragetasche

für einfachen und sicheren Transport.



Verwenden Sie Medela Zubehör für noch mehr Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit.

Technische Daten

	min. -18 kPa med. -36 kPa max. -80 kPa	-131 mmHg -266 mmHg -595 mmHg
	Low flow 15 l/min.	
	Leistung 100 – 240 V 50 – 60 Hz	

	AC AC/DC	1,7 kg 2,0 kg
	H x B x T 223 x 255 x 95 mm	

	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/EEC), IIa 2 Jahre Garantie	 0123
		

Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren örtlichen Medela Fachhändler.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland
www.medela.com

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 (0)89 31 97 59-0
Fax +49 (0)89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Örtlicher Fachhändler:

Medela AG
Medical Technology
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch