

Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Tel 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch
www.kuhnbieri.ch



Kontrollsysteme für die Sterilisation

Jede Sterilisation wird über Sonden überwacht. Die Daten mit Zeit, Druck und Temperatur können mit dem CF Kartenschreiber oder Drucker dokumentiert werden.

Zusätzlich wird jede Sterilisation mit einem Indikatorstreifen geprüft, welcher nach erfolgreicher Sterilisation einen Farbumschlag anzeigt. Bei Klasse B Sterilisatoren wird dies mit dem **Melacontrol** Indikatorsystem gemacht. Bei Klasse S Sterilisatoren mit dem **steriCLIN Indikatorstrip**. Die Produktbeschreibungen finden Sie weiter unten.

Nach erfolgreichem Farbumschlag des Indikatorstreifens wird dies auf einem von Hand geführten Sterilisationsprotokoll notiert, mit Notiz des gewählten Sterilisationsprogrammes und dem Datum. Für dieses Sterilisationsprotokoll finden Sie auf unserer web Seite ein Beispiel als pdf Datei zum Ausdrucken.

Wir empfehlen Ihnen folgendes Vorgehen bei der Dokumentation:

1. Minimum Variante:

Führen des Protokolls von Hand, mit Notiz des Farbumschlages des Indikators. Speicherung aller Sterilisationsdaten mit dem CF Kartenschreiber oder Melaprint Drucker.

2. Profi Variante:

Zusätzlich zur Minimum Variante werden pro Sterilisationscharge mit dem Meladoc Etiketten gedruckt mit Datum, Verfallsdatum und Chargennummer. Eine Etikette wird auf das Protokoll geklebt, die anderen auf die Verpackungen. Wird ein Instrument aus der Verpackung genommen, wird das Etikett von der Verpackung auf die Patientenakte geklebt. Damit ist die Rückverfolgbarkeit von Patient, angewandtem Instrument bis zur Sterilisationscharge perfekt. Das Meladoc finden Sie unter Produkte / Melag / Dokumentation.

Wie lange sind die Daten aufzubewahren?

Nach Obligationenrecht 5 Jahre, die Swissmedic empfiehlt 10 Jahre. Um zuviel an Papierprotokollen zu vermeiden, ist der CF Kartenschreiber dem Melaprint Drucker vorzuziehen.

Melacontrol

MELAG Indikatorsystem nach EN 867-5 für Klasse B Autoklaven.

In die abnehmbare Kappe wird der Teststreifen eingesetzt. Der Autoklav muss die Luft aus dem englumigen Schlauch entfernen und mit Dampf ersetzen. Der Farbumschlag zeigt die erfolgreiche Sterilisation an. Nur für Klasse B Autoklaven mit Vorvakuum geeignet. Melacontrol wird bei jeder Sterilisation eingesetzt, und der erfolgreiche Farbumschlag in der Dokumentation protokolliert.

Die Lieferung erfolgt jeweils mit 250 Indikatorstreifen.



steriCLIN INDIKATORSTRIP

Indikatorstreifen zur Überprüfung der Sterilisation bei Klasse S Sterilisatoren. der Indikatorstreifen wird bei jeder Sterilisation eingesetzt, und der erfolgreiche Farbumschlag in der Dokumentation protokolliert.

