

Bedienungsanleitung

■ Mode d'emploi

Kuhru Bieru Kuhru
Kuhru Bieru Kuhru
Bieri Kuhru Bi
a Bieru Kuhru K
Kuhru Bieru Kuhru
Bieri Kuhru
Kuhru Bieru Kuhru
Bieri Kuhru Bi

Einhandvenenstauer
■ Garrot
Jetpull

Einhand-Venenstauer SÖHNGEN®

Bedienungsanleitung

JETPULL® Ultimate

Jetpull Ultimate does not open unless the pressure of the band is released. Always

1. Press down the ribbed key to release tension.
2. Simply squeeze then the two lateral oval push buttons. The closure opens and ejects automatically the band.

Please be sure to follow these instructions for correct use.

Jetpull can be machine washed in warm water and sterilized by steam 121° C 2 bar.

Made in Germany,
International Patented.

JETPULL® Ultimate

Jetpull Ultimate mit Sicherheitsverriegelung, kein Öffnen bevor das Band entspannt ist. Das heißt:

1. Zuerst auf die markierte Taste drücken. Dadurch wird das Band gelockert.
2. Dann erst die beiden gegenüberliegenden Knöpfe zusammendrücken. Der Verschluss öffnet sich automatisch, das Band wird abgeworfen.

Die Reihenfolge der beiden Schritte ist unbedingt einzuhalten.

Jetpull ist komplett waschbar bis 60° oder autoklavierbar bei 121° C, 2 bar.

Internationale Patente CE


JETPULL® Ultimate Gebrauchsanleitung



öffnen



anlegen

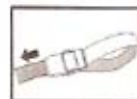

festziehen



langsam
lösen



JETPULL® Ultimate Instructions



open



close



tighten



slow
release





Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch