

Bedienungsanleitung

■ Mode d'emploi



Gehbock
■ Déambulateur
XXL-Plus

Bremseinstellung

- Die Bremswirkung kann direkt am Bremshebel oder am Bowdenzug eingestellt werden
- Die Bremse ist korrekt eingestellt, wenn die Bremshebel wie auch die Bowdenzüge kein Spiel aufweisen und die Räder sich ohne Schleifgeräusche drehen lassen



Sicherheitshinweise

- Hängen Sie keine Taschen an die Griffe.
- Beim Benutzen auf abschüssigen Wegen kann die Rollgeschwindigkeit höher werden als die eigene Schrittgeschwindigkeit; benutzen Sie dann die Betriebsbremse.
- Benutzen Sie den Rollator nur auf ebenen horizontalen und festen Untergrund.
- Beim starken Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen.
- Beim Zusammenklappen des Rollators XXL können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie keine Dampfstrahlergeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel!

Wartung

Der Rollator XXL ist wartungsfrei. Wenn Sie ein Nachlassen der Bremsen, Schwergängigkeit der Räder oder andere Funktionseinschränkungen feststellen werden, ist Rollator für eine Instandsetzung dem Fachhandel zu übergeben.

Lieferumfang

- Rollator XXL
- Einkaufskorb
- Rückenlehne
- Gebrauchsanweisung und Werkzeugset

Garantie

- Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.


Technische Daten

Maximale Zuladung:	200 kg
Leergewicht:	12,6 kg
Gesamtbreite:	710 mm
Gesamttiefe:	730 mm
Gesamthöhe:	820 – 925 mm
Wenderradius:	1360 mm
Abstand zwischen den Handgriffen:	640 mm
Sitzhöhe:	550 mm
Verstellungen:	Schiebegriff: 820 - 920 mm (5-fach verstellbar)
Bereifung:	Ø 200 x 30 mm, pannensicher

Stand: 01/2007/Rev.1

Gebrauchsanweisung

Rollator XXL Mighty Mack

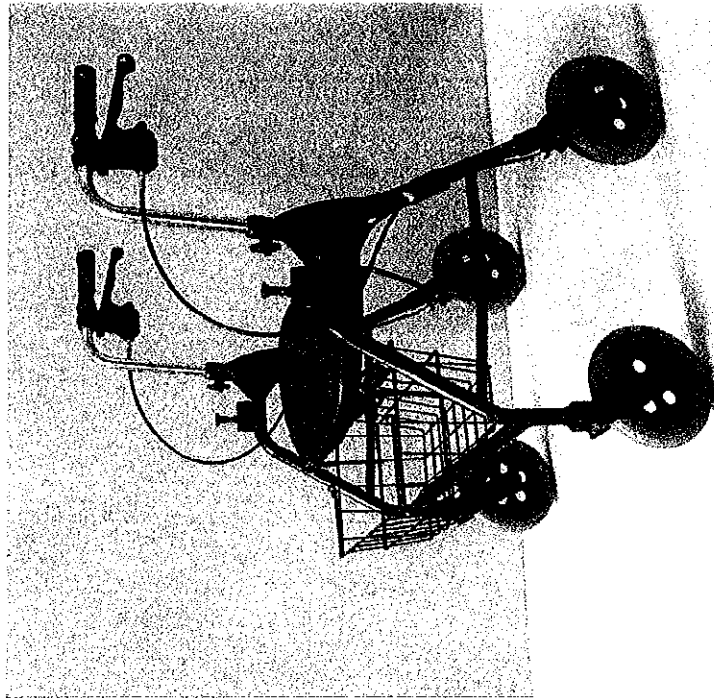

Descotrassse 10
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 - 86



Allgemeines

Für den hier beschriebenen Rollator XXL ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs.

Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt.

Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser

Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise,

bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Rollator XXL dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 200 kg Körpergewicht als Gehhilfe und eingeschränkt auch als Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen.


Der unter der Sitzfläche eingehängte Drahtkorb ist zur Ablage und zum Transport von Gegenständen oder Waren vorgesehen.

Der Rollator XXL darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden.

Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufsiegehilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich!


Aufstellen / Entfalten des Rollators

- Positionieren Sie den Rollator vor sich in Fahrrichtung
- Betätigen Sie die Feststellbremse
- Halten Sie den Rollator mit der einen Hand am Handgriff
- Drücken Sie mit der anderen Hand den Sitz nach unten bis er spürbar einrastet
- Befestigen Sie die Rückenlehne
- Hängen Sie den Korb von vorn am Rahmen ein

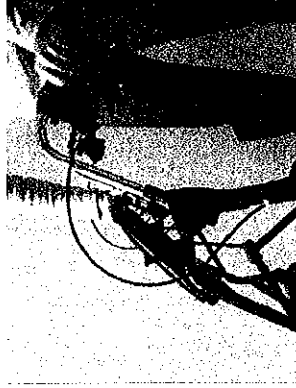

Falten des Rollators

- Nehmen Sie den Korb vom Rahmen ab
- Positionieren Sie den Rollator in Fahrrichtung vor sich und betätigen Sie die Feststellbremsen
- Halten Sie den Rollator mit der einen Hand am Handgriff
- Lösen Sie mit der anderen Hand den Sitz mit einem ruck aus der Verankerung
- Nun ziehen Sie den Rollator ganz zu sich heran
- Zum Verstauen des Rollators können Sie die Rückenlehne und die Schiebegriffe demonstrieren

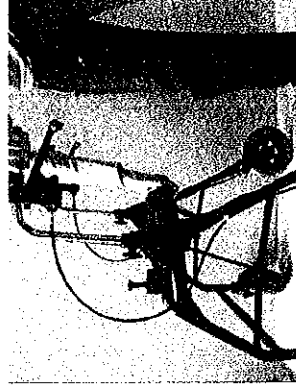


Rollator XXL

Schiebegriff einstellen


- Betätigen Sie als Erstes die Feststellbremse
- Lösen Sie die Verschraubung und nehmen Sie die Befestigungsschraube ganz heraus
- Positionieren Sie die Schiebegriffe in der korrekten Höhe (Empfohlen: Schiebegriffe sollten sich in Höhe des Handgelenks befinden)
- Anschließend sind die Befestigungsschrauben wieder einzusetzen und mit der Sternmutter festzuziehen

Achten Sie darauf, dass die Schraube komplett in der Bohrung versinkt. Zum Verstauen des Rollators können Sie die Schiebegriffe auch ganz aus dem Rahmen herausnehmen.

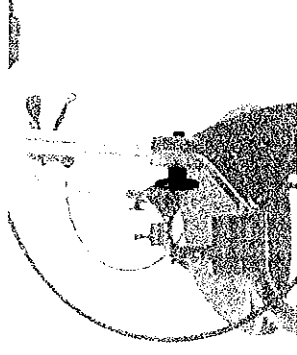

Rückenlehne befestigen




- Ziehen zuerst die Zugschnäpper mit einer leichten Drehung nach oben, sodass sie die Arretierung freigeben
- Schieben Sie die Rückenlehne in die Bohrungen
- Betätigen Sie nun die Zugschnäpper, sodass diese vollständig einrasten
- Bei der Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor
- Zum Verstauen des Rollators können Sie die Rückenlehne auch separat Lagern.

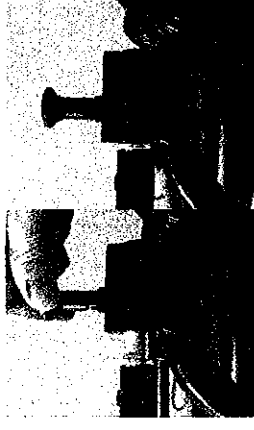

Betriebs- und Feststellbremse

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- Die Bremse wird als Betriebsbremse (beim Schieben), durch ziehen des Bremshebels nach oben verwendet
- Durch Drücken des Hebels nach unten wird die Bremse als Feststellbremse (beim Parken) verwendet





Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Könizstrasse 227, 3097 Liebefeld

Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch