

Gebrauchsanweisung

DAS TEMPUR® MATERIAL

DRUCKENTLASTUNG

Die druckentlastenden Eigenschaften von TEMPUR® helfen bei Nacken- und Rückenleiden und verringern die Gefahren von Druckgeschwüren.

WÄRMEEMPFINDLICHKEIT

Das TEMPUR® Material wird mit steigender Temperatur weicher und mit fallender Temperatur härter. Unter dem Einfluß der Körperwärme wird das TEMPUR® Material weicher und paßt sich dem Körper an. Die Druckbelastung wird gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt. Sobald der Druck aufgehoben wird, kehrt das Material in seine ursprüngliche Form zurück.

BRENNBARKEIT

Alle Polyurethan-Schaumstoffe brennen, wenn sie offenem Feuer ausgesetzt werden. Der durch das Feuer entstehende Rauch enthält toxische Substanzen, die gefährlich sind, wenn sie eingeatmet werden. Bitte denken Sie immer daran, daß Rauchen im Bett gefährlich ist!

CE-Zeichen

TEMPUR® Produkte tragen als medizinische Ausrüstungen das CE-Zeichen Klasse 1 Anlage VII. Das bedeutet, daß die Produkte den festgelegten gesundheitlichen Anforderungen der Directive 93/42/EWG entsprechen.

DIE GEWÖHNUNG AN TEMPUR® PRODUKTE

Es kann eine Weile dauern, bis sich der Körper an die druckentlastenden Eigenschaften der TEMPUR® Produkte gewöhnt hat.

DER UMGANG MIT TEMPUR® PRODUKTE

TEMPUR® DARF NICHT GEWASCHEN WERDEN

Um TEMPUR® Produkte zu reinigen, ziehen Sie die Bezüge ab und tupfen das TEMPUR® Material mit einem feuchten Tuch ab oder lüften es. Produkte aus TEMPUR® sollten nicht geklopft werden.

TEMPUR® MUß TROCKEN GEHALTEN WERDEN

Bei Inkontinenz empfehlen wir flüssigkeitsundurchlässige, aber atmungsaktive Polyurethan-Bezüge, die als Zubehör erhältlich sind.

TEMPUR® DARF NICHT GEFALTET WERDEN

TEMPUR® Produkte dürfen nicht gefaltet werden. Das Material kann an den Knickstellen brechen. Für den Transport oder für die Handhabung im Lager sollen TEMPUR® Produkte aufgerollt oder flach gelagert werden.

BEZÜGE FÜR TEMPUR® PRODUKTE

Die Bezüge für die TEMPUR® Produkte sind so hergestellt, daß sie die maximale Druckentlastung des TEMPUR® Materials gewährleisten.

Alle Bezüge können abgezogen und gewaschen werden. Beachten Sie bitte die Waschanleitung. Vor dem Waschen den Reißverschluß zuziehen. Die Waschanleitung enthält auch Angaben über die in dem Bezug verwendeten Gewebe und Materialien.

Eine Reihe von Bezügen ist auf der Unterseite mit einer rutschfesten Oberfläche ausgestattet. Die Eigenschaften des rutschfesten Materials werden durch Waschen nicht beeinträchtigt.

Werden TEMPUR® Produkte in Situationen eingesetzt, in denen Inkontinenz vorkommen kann, so sind Inkontinenzbezüge erhältlich. Die Inkontinenzbezüge sind atmungsaktiv aber flüssigkeitsundurchlässig. Die Bezüge können bis 95°C gewaschen oder in Autoklaven gereinigt werden. Sie sind beständig gegenüber den üblichen, in Krankenhäusern verwendeten Desinfektionsmitteln.

Hinweis: Kinder sollten nicht mit Inkontinenzbezügen spielen, es besteht Erstickungsgefahr!

Außen oder im Inneren Ihres Kissenbezuges ist ein eingenähtes Etikett. Hier sind die Symbole angebracht, die Aussagen darüber geben, wie heiß der Bezug gewaschen werden darf und ob Sie den Bezug in den Trockner geben können.



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch