

Gebrauchsanweisung

Badewannensitz

Mit Rückenlehne 9403-B und
ohne Rückenlehne 9403-A



Für die Bestellnummern 000224 und 000225 gilt die hier vorliegende Gebrauchsanweisung.



Descostraße 10
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 - 86

Inhaltsverzeichnis Badewannensitz

Allgemeines	3
1. Vorbemerkung	4
1.1. Verwendete Symbole und ihre Bedeutung	4
1.2. Lieferumfang und Lieferzustand	4
1.3. Transport/ Verpackung / Auspacken/ Prüfen	5
1.3.1. Auspacken	5
1.4. Hinweise des Herstellers für den Fachhandel	5
1.5. Richtlinien, Gesetze, Normen	5
1.6. Kennzeichnung und Typenschilder	6
2. Bestimmungsgemäße Verwendung und Indikation	6
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.2 Indikation	6
2.3 Kontraindikation	6
3. Sicherheit	7
3.1. Gefahren-Gesamteinschätzung	7
3.2. Allgemeine Sicherheitshinweise	7
4. Bestandteile	7
5. Benutzung	8
5.1 Badewannensitz anpassen	8
5.2 Badewannensitz aufsetzen	8
5.3 Sitzen	9
6. Reinigen	10
7. Störungen/ Fehlerbehebung	10
8. Wartung/ Inspektion	10
9. Technische Daten	10
10. Entsorgung	10
11. Garantie	11

Allgemeines



Für die hier beschriebene Badewannensitze ist die Konformität gemäß der Richtlinie 93/42 EWG, für Medizinprodukte, erklärt.

Geräte- Nr.:

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs.
Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weiterverkauf des Produktes beim Produkt.

Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.
Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers.
Das Urheberrecht liegt beim Herausgeber.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei:



Descostraße 10
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 - 86

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Benutzerin,
sehr geehrter Benutzer,

Sie haben sich für ein technisch ausgereiftes und nach dem neuesten Stand der Technik konstruiertes und zuverlässiges Produkt entschieden.



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung **bevor** Sie den Badewannensitz montieren und benutzen.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für Badewannensitze **mit** und **ohne Rückenlehnen**.

Diese Gebrauchsanweisung dient allen Anwendern, insbesondere dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung des Badewannensitzes.

Diese Anweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes.

Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und die Handhabungssicherheit beizubehalten, lesen Sie die Gebrauchsanweisung, halten Sie die vorgegebenen Handlungsanweisungen ein und sorgen Sie dafür, dass die Gebrauchsanweisung für die Benutzer erreichbar bleibt.

Technik Article Dietz

1.1. Verwendete Symbole und ihre Bedeutung



ACHTUNG!

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn Sie diese nicht vermeiden, können Personenschäden oder Sachschäden die Folge sein.



WICHTIG!

Bezeichnet besonders nützliche Informationen im jeweiligen Sachzusammenhang und Hinweise, die befolgt werden müssen.

1.2. Lieferumfang und Lieferzustand

Der Lieferumfang beinhaltet:

- 1 Badewannensitz
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Verpackungs- und Transportkarton (wiederverwendbar)

1.3. Transport/ Verpackung / Auspacken/ Prüfen

Der Badewannensitz wird in gebrauchsbereitem Zustand ausgeliefert, von Fachhandel-Technikern, bzw. vom Betreuungspersonal montiert und die Funktion überprüft.



Vor dem Auspacken die Verpackung überprüfen. Ist die Verpackung beschädigt, kann auch der Inhalt beschädigt sein.

Ist der Inhalt erkennbar beschädigt, unverzüglich das Frachtunternehmen verständigen.



Geräteschaden!

Bei Fallenlassen besteht die Gefahr der Beschädigung und Funktionsstörung.

1.3.1. Auspacken

Der Badewannensitz ist komplett in Folie verpackt. Nach dem Entpacken die Folie nach den jeweiligen örtlichen Vorschriften entsorgen.



Folie nicht verbrennen! Beim Verbrennen können giftige Gase entstehen.

Nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und Vollzähligkeit gem. den Lieferunterlagen überprüfen.

1.4. Hinweise des Herstellers für den Fachhandel

Der Fachhandel prüft den Badewannensitz

- auf Vollständigkeit,
- auf unbeschädigte Teile, hierbei insbesondere ob keine Teile verbogen sind,
- ob die Lieferung allgemein ohne Beanstandung zusammengebaut werden kann und ob alle Teile funktionsfähig sind.
- Passen Sie den Badewannensitz gemäß Kap. 5.1 an die Badewanne an.

1.5. Richtlinien, Gesetze, Normen

Angewandte Richtlinien, Gesetze, Normen und Regelwerke:

- Richtlinie des Rates 93/42 EWG, Medizinprodukte
- MPG, (Medizin-Produkte-Gesetz) der Bundesrepublik Deutschland


1.6. Kennzeichnung und Typenschilder

Typen und Herstellerschild an der Unterseite.



Schilder müssen lesbar bleiben. Unlesbare oder fehlende Schilder unverzüglich ersetzen.

Das Typenschild ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Es darf nicht entfernt werden.

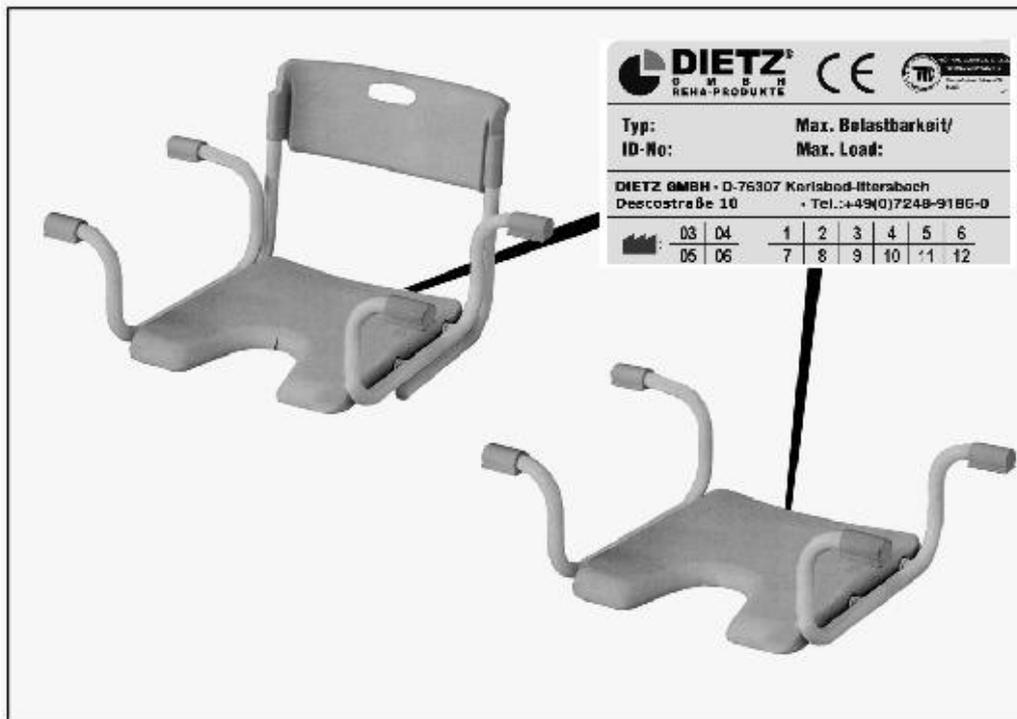

Techn. Zeichnung

2. Bestimmungsgemäße Verwendung und Indikation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Badewannensitz ist ausschließlich für Personen mit einem Körpergewicht bis max. 120 kg für die sichere Körperpflege in der Badewanne geeignet.

2.2 Indikation

Die Verwendung des Badewannensitzes ist angezeigt bei

- Stand und Stehunsicherheit
- Minderung oder Fehlen der Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten

2.3 Kontraindikation

Der Badewannensitz darf nicht verwendet werden bei Personen, die

- nicht in der Lage sind ihr Gleichgewicht im Sitzen zu kontrollieren

3. Sicherheit

3.1. Gefahren-Gesamteinschätzung

Bei Einhaltung der bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Badewannensitzes keine Gefahr aus.

Die verwendeten Materialien und die Konstruktion entsprechen den Anforderungen aus den EG-Richtlinien, dem Medizin- Produkte- Gesetz und den Normen für Medizinprodukte.

3.2. Allgemeine Sicherheitshinweise



Ausrutschgefahr!

Beim Hinsetzen und Aufstehen in der Badewanne.

Bzw. beim Hineinsteigen in die Badewanne oder beim Heraussteigen, können gebrechliche Personen ausrutschen. Betreuungspersonen überprüfen den festen Halt des Badewannensitzes.




Klemmgefahr!

Beim Einstellen des Badewannensitzes in der Breite und beim Greifen in den Spalt zwischen Rahmen und Sitzfläche können Personen sich die Finger einklemmen.

Einklemmgefahr für Finger und Genitalien in den Bohrungen der Sitzfläche.

4. Bestandteile

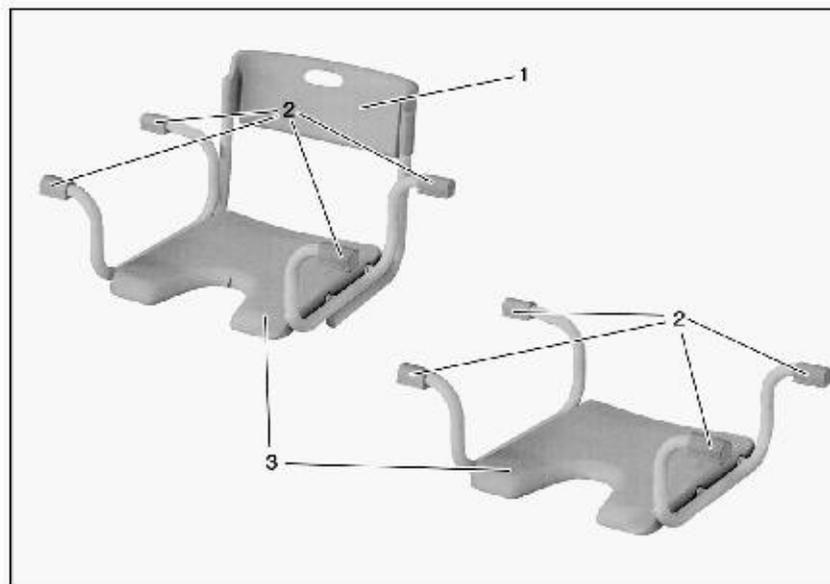

Rückenlehne (1)

Badewannenrand- Auflage (2)


Sitz (3)

5. Benutzung

5.1 Badewannensitz anpassen



Der Badewannensitz muss an die Badewannenbreite angepasst werden. Hierzu dienen die Verstellungen auf der Sitzunterseite.

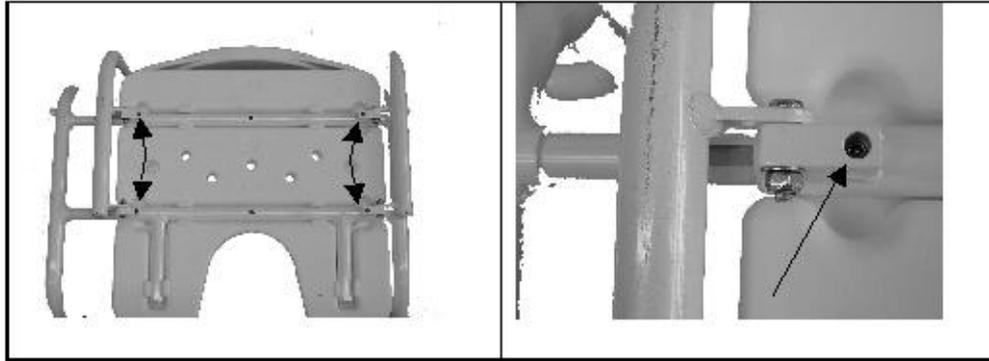


- ⇒ Lösen Sie die 4 Innensechskantschrauben mit einem Innensechskantschlüssel SW 4.
- ⇒ Setzen Sie den Badewannensitz in die Badewanne und ziehen Sie beide Seiten des Auflagerahmens soweit hinaus, dass die Auflagegummis vollständig auf dem Wannenrand aufliegen.
- ⇒ Achten Sie darauf, dass beide Seiten gleichermaßen herausgezogen sind.
- ⇒ Nehmen Sie den Badewannensitz nun aus der Badewanne heraus und ziehen die 4 Schrauben wieder fest.

5.2 Badewannensitz aufsetzen



Der Badewannensitz kann in jeder üblichen Badewanne mit Normalmaß verwendet werden. Die Auflagebügel haben einen rutschhemmenden Überzug **(1)**. Dadurch wird ein Wegrutschen auf dem Badewannenrand verhindert.

Den Badewannensitz so in die Badewanne setzen, dass die Auflagebügel auf dem Wannenrand vollständig aufliegen.

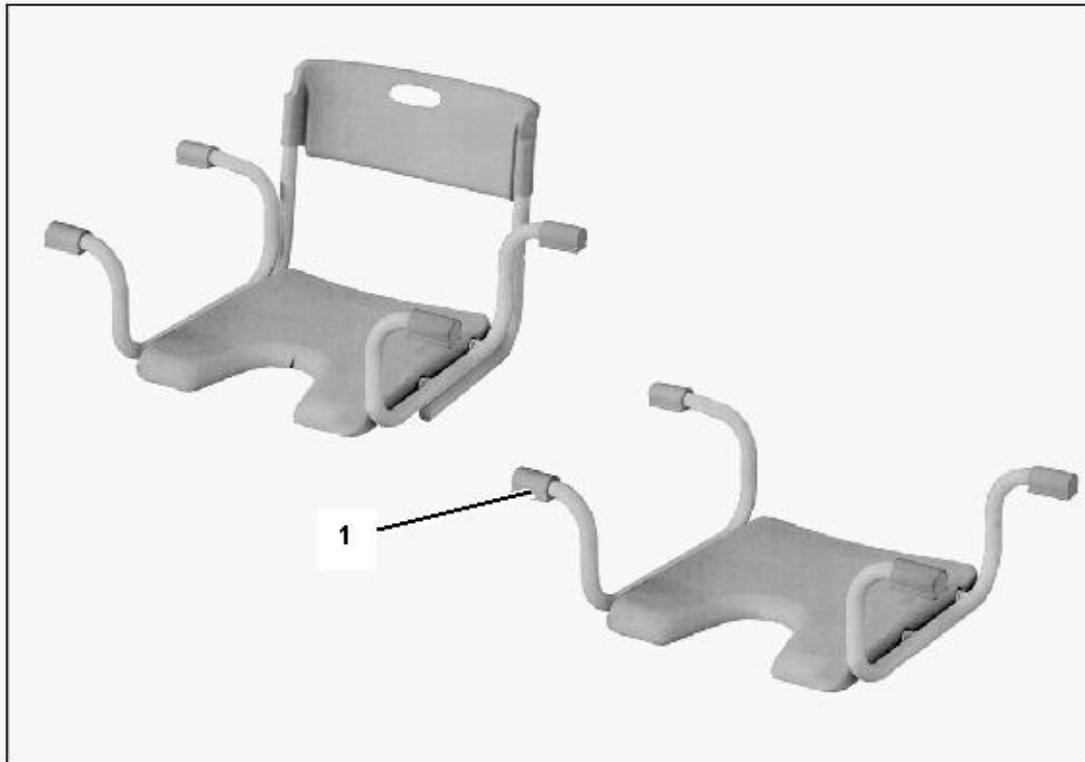

5.3 Sitzen

Rutschgefahr!



Immer mit Hilfe von Betreuungspersonen in die Badewanne einsteigen und auf dem Sitz Platz nehmen.

Zum Hinsetzen und Aufstehen an der Badewanne festhalten.

Kippgefahr!



Wenn eine oder mehrere rutschhemmende Kunststoffüberzüge beschädigt sind oder fehlen, kann der Sitz abrutschen. Dann nicht benutzen.

6. Reinigen



Reinigen mit handelsüblichem Desinfektionsmittel.

- Den Badewannensitz mit einem feuchten Lappen abreiben und
- Gelegentlich mit handelsüblichen Mitteln desinfizieren.

7. Störungen/ Fehlerbehebung

Zur Störungsbehebung und Fehlerbeseitigung den Badewannensitz an den Fachhandel übergeben. Ausgenommen solche Störungen, die durch Reinigung beseitigt werden können.

8. Wartung/ Inspektion



Der Badewannensitz ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, den Badewannensitz dem Fachhandel übergeben.

9. Technische Daten

Best.-Nr. cm	Gesamtbreite cm	Gesamttiefe cm	Gesamthöhe cm	Sitzfläche cm	Leergewicht kg	Max. Zuladung kg
000224	73,5-90,0	41,0	40,0	40,0 x 40,0	3,7	120
000225	73,5-90,0	54,5	24,0	40,0 x 40,0	2,7	120

10. Entsorgung



Wenn der Badewannensitz die Nutzungsdauer erreicht hat oder aus anderen Gründen nicht mehr benutzt werden kann, sind die Bestandteile durch den Fachhandel zu entsorgen.

11. Garantie

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens nach Auslieferung.

Von der Gewährleistungspflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen welche durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind.

Desgleichen gilt bei Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten.

Bei Beanstandungen ist die vollständig ausgefüllte Garantie-Urkunde mit einzureichen.

Teil A/11/lebriz

Garantie- Abschnitt

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
Produkt:

Modellbezeichnung*

Seriennummer* (vom Typenschild entnehmen)

Fachhändler:

Datum und Stempel



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Könizstrasse 227, 3097 Liebefeld
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch