


SimplyGo Bedienpanel

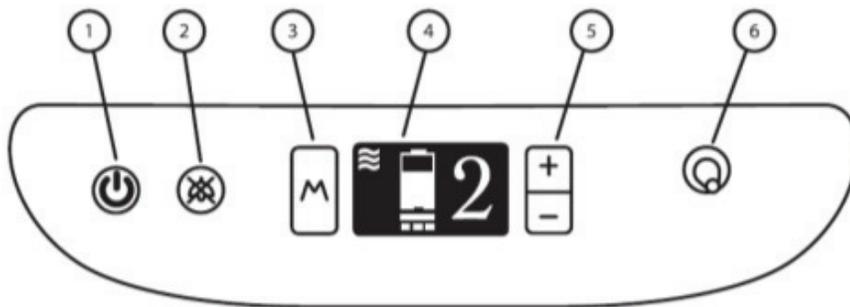

1. Start/ Stopp
2. Alarm stumm schalten
3. Auswahl Modus: kontinuierlich – Puls – Schlaf
4. Bildschirm
5. Einstellung erhöhen/ verkleinern
6. Anschluss Nasenbrille (bis 9m)




SimplyGo Modus

SimplyGo hat 3 verschiedene Modi zum Einstellen:

- Getriggierter Modus


Liefert die eingestellte Menge Sauerstoff an den Patienten. Kann für Patienten, die einen Dauerflow über 2 l/min benötigen adaptiert werden.

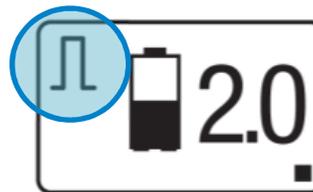

Einstellungen 1-6 in 0,5 Schritten
Triggerempfindlichkeit= - 0,16 cm H₂O


- Dauerflow

Ein wahrer Vorteil für Patienten, die tagsüber oder auch nachts einen Dauerflow benötigen.

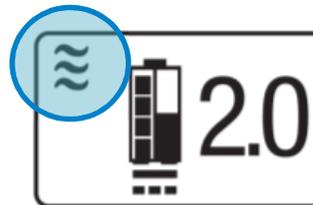

- Schlafmodus

Kann für Patienten genutzt werden, die nachts mehr als einen Dauerflow von 2 l/min benötigen.

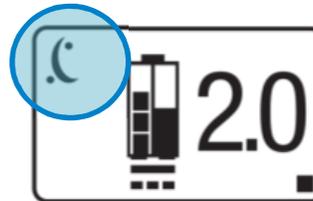

Pulsmodus für nachts
Triggerempfindlichkeit: - 0,11 cm H₂O

SimplyGo Alarme



- Keine Atmung erkannt (NB)
 - Es wird für 2 Minuten keine Atmung erkannt
 - Der Alarm kann stumm geschaltet werden, sobald wieder eine Atmung erkannt wird- schaltet sich der Alarm automatisch ab
 - Das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten NB ab (ist innerhalb der ersten 10 Minuten nach Einschalten des SimplyGo inaktiv)



- Niedrige Sauerstoffkonzentration (O₂)
 - Alarm ertönt, wenn die Sauerstoffkonzentration unter 83% fällt



- Hohe Atemfrequenz
 - Atemfrequenz des Patienten überschreitet die Sauerstoffkapazität des SimplyGo
 - Das Gerät arbeitet weiter, versorgt den Patienten weiter mit Sauerstoff mit dieser Atemfrequenz

SimplyGo Alarme



- Technischer Fehler
 - Erscheint, wenn die Batterie leer ist oder wenn das Gerät einen technischen Fehler hat und nicht mehr richtig arbeitet



- Niedrige Batterieladung
 - Erscheint, wenn nur noch 17 Minuten Batterielaufzeit vorhanden sind



- Entladene Batterie
 - Erscheint, wenn nur noch 2 Minuten Batterielaufzeit vorhanden sind



- Kein Flow
 - Erscheint, wenn das Gerät erkennt, dass kein Sauerstoffflow an die Nasenbrille abgegeben wird