



Integrierte Stütz- und Kompressionszonen (Tytex ZoneTech<sup>®</sup>) für beste chirurgische Ergebnisse

Vollständig zu öffnen für eine einfache Untersuchung

Bietet optimalen Komfort und ist besonders hautfreundlich

# Mary

NAHTLOSER POST-OP-BH



Für Mastektomie und Lumpektomie

KOMPRESSIONSSTUFE 2 - STRAFF



Stütz-/  
Kompressionszonen



Atmungsaktiv



4-Wege-Stretch



Ohne Nähte



Kann vollständig  
geöffnet werden


**TYTEX**<sup>®</sup>

Frontöffnung mit 2-reihigem Hakenverschluss für eine Kompressionsanpassung

Ultraweiches, latex-freies und atmungsaktives Mikrofasermaterial

Breites Unterbrustband für eine zusätzliche Stützung

Eingearbeitete Unterbruststütze

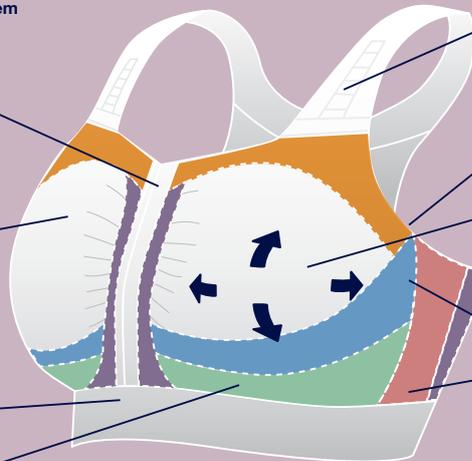

Die verschiedenen Farbtöne zeigen die unterschiedlichen Stütz-/Kompressionszonen an (Tytex ZoneTech®)

1 2 3 4 5 6  
Einstufung 1-6, 1 ist die höchste.

Anpassbare und breite, zu öffnende Schulterträger


Taschen auf beiden Seiten für BH-Einlagen aus Carefix-Stoff

4-Wege-Stretch für eine optimale Stützung in der gesamten Erholungsphase

Das 100 % nahtlose Strickgewebe verhindert eine Wund- und Hautirritation und bietet optimalen Komfort für die Trägerin



Hohe Rückenpartie für optimale Stützung. Kompressionszonen auf dem Rücken und an den Seiten.

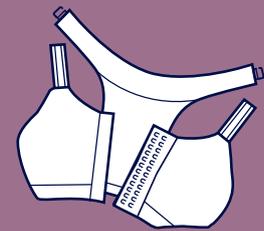

Vollständig zu öffnen für ein einfaches Anziehen (sowohl Brust- als auch Schulterträger)

Der Mary-BH wurde für die Zeit nach einem chirurgischen Brusteingriff entworfen, wenn die Haut weich und empfindlich ist und eine Stützung und Kompression notwendig sind.

Der BH trägt zur Heilung und zum Schutz der Wunde bei und verringert dabei das Risiko von Ödemen und postoperativen Komplikationen.

Dank seiner Frontöffnung und den zu öffnenden Schulterträgern ist der BH für das Pflegepersonal und die Patientin selbst leicht anzulegen. Er ermöglicht zudem eine problemlose Untersuchung des Operationsbereichs.

Mit den besonderen integrierten Kompressionszonen (Tytex ZoneTech®) bietet der Mary-BH ein optimales Gleichgewicht zwischen Kompression und Komfort.

### Indikationen:

Medizinprodukt für den Gebrauch nach einer Brustoperation, besonders bei einer Mastektomie und Lumpektomie. Taschen auf beiden Seiten für BH-Einlagen aus Carefix-Stoff (nicht enthalten).

### Vorsichtsmaßnahmen:

Wenden Sie sich bei Fragen bezüglich des Gebrauchs und des korrekten Anbringens bitte an Ihren Arzt oder an Ihr Pflegepersonal. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Bandagen und/oder Drainageleitungen unterhalb des BHs korrekt angebracht sind, um Druckstellen und/oder einer Unterbindung des Drainageflusses vorzubeugen. Bei Brustvergrößerungen kann ein Stabilisierungsband für Brustimplantate erforderlich sein. Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt oder Chirurgen. Befolgen Sie immer die Ratschläge des Chirurgen. Der BH muss vor Beginn einer Strahlentherapie abgelegt werden, da er Metallteile enthält. Wenden Sie sich bei unerwarteten Beschwerden, Wundirritationen oder ähnlichem bitte an Ihren Arzt oder an Ihr Pflegepersonal.

### Empfohlene Größen

| Band Size | CM | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 110 cm | 115 cm | 120 cm | 125 cm | 130 cm | 135 cm |  |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| IN        |    | 28 in | 30 in | 32 in | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in  | 42 in  | 44 in  | 46 in  | 48 in  | 50 in  | 52 in  | 54 in  |  |
| Cup Size  | AA |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|           | A  |       | S     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|           | B  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|           | C  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|           | D  |       | M     |       |       | L     |       |        | XL     |        | 2XL    |        | 3XL    |        | 4XL    |  |
|           | E  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| F         |    |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |  |

\* HINWEIS: Aufgrund von postoperativen Schwellungen und Ödemen könnten Sie 1 bis 2 Größen über Ihrer normalen BH-Größe benötigen. Wenn Sie mehr Kompression benötigen, wählen Sie eine Größe größer. Wenn Sie weniger Kompression benötigen, wählen Sie eine Größe kleiner. Wichtig: Messen Sie sich immer, um die richtige Größe zu finden!

Erhältliche Farben:



### Material:

S – XXL  
91 % Polyamid  
9 % Elasthan

3XL – 4XL  
94 % Polyamid  
6 % Elasthan

### Waschhinweise:



Haken und Ösen vor dem Waschen schließen. Mit ähnlichen Farben und in einem Wäschenetz waschen. Der Gebrauch von chlorbasierten Desinfektionsmitteln beeinträchtigt die Lebensdauer und Funktion.

www.carefix.eu



TYTEX A/S ist gemäß den Standards ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 zertifiziert

**TYTEX**