

Pflegebett AURA






reddot design award
winner 2016


GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



Designing a product
is designing
a relationship“

Steve Rogers

| | |
|--|----|
| AURA – das Premium-Pflegebett | 4 |
| Funktionalität in Vollendung | 6 |
| Mobilisierend und schützend..... | 9 |
| Prophylaxe zahlt sich aus..... | 10 |
| Liegeflächen..... | 12 |
| Integrierte Bettverlängerung | 13 |
| Das passende Bett für jede Anforderung | 14 |
| Integrierte Bettzeugablage..... | 16 |
| Ausstattungen und Optionen | 17 |
| Technische Angaben..... | 17 |
| Bettfronten | 18 |
| Zubehör..... | 19 |
| Holzreplikationen | 20 |
| Leder- und Stoffkollektionen..... | 21 |
| Malsch INDIVIDUAL | 22 |



EINFACHHEIT
im Extremen wird
zu ELEGANZ

Neville Brody

Das puristische Design des Premium-Pflegebettes AURA überzeugte bereits die Juroren namhafter Design-Gremien, wie dem Red Dot und German Design Award.

Das Niedrigpflegebett verbindet auf vortreffliche Weise Design, Funktion und Sicherheit. Die schlichte äußere Erscheinung lässt die Vielfalt des AURA nicht erahnen.

Umfangreiche Komfortfunktionen tragen zum Wohlbefinden der Bewohner bei und schaffen optimale Bedingungen für eine sichere und schonende Pflege.

AURA – das ist Individualität und Vielfalt bis ins Detail. Erleben Sie vollste Flexibilität bei der Konfiguration und kreieren Sie ein Design nach Ihrem Gusto. Profitieren Sie darüber hinaus von der langfristigen Beständigkeit des AURA und erlangen Sie Planungssicherheit und kreativen Freiraum für Ihre Projekte.



AURA

Funktionalität in Vollendung



AURA steht für funktionale Vielfalt im Einklang mit erstklassigem Design. Das Niedrigbett wartet mit umfangreichen Funktionen auf, die Bewohnern und Pflegepersonal besten Komfort und höchstmögliche Sicherheit gewährleisten.



Insbesondere sturzgefährdete Bewohner profitieren von der **Niedrigposition** (1) des AURA, die das Verletzungsrisiko in Folge eines Sturzes aus dem Bett durch die geringe Betthöhe deutlich minimiert. Weitere innovative Funktionen zur Sturzprophylaxe sind auf Seite 10/11 beschrieben.



Eine angenehme Zwischenhöhe zum optimalen Ein- und Ausstieg auf Sitzhöhe stellt die **Transferposition** (2) bereit. In Verbindung mit der Mobilisierungsposition der Seitengitter können sich die Bewohner bequem und sicher im Bett einfinden oder eigenständig aufstehen.



Ergonomisches, rückschonendes Arbeiten ist zur Gesunderhaltung des Pflegepersonals ein wichtiger Aspekt. In der Position der **Arbeitshöhe** (3) ist eine aufrechte Haltung bei der Versorgung von Bewohnern gegeben.



Mittels Tastenautomatik am Handschalter fährt die Liegefläche in eine bequeme, aufrechte Sitzposition. Die **Komfort-Sitzposition** (4) wirkt positiv auf die Vitalfunktionen, erleichtert Bewohnern die Orientierung und begünstigt die Kommunikation untereinander.

Die **Trendelenburg-Position** (5) kann zur Stabilisierung von Bewohnern mit Kreislaufproblemen beitragen. Die elektromotorische Verstellung in die Kopftieflagerung ermöglicht schnelles Handeln.







Mobilisierend und schützend

Die Vorzüge des vertikal versenkbaren Seitengittersystems bestehen in der kompakten Bauform, die keinen seitlichen Platzbedarf erfordert sowie der außerordentlichen Stabilität der präzise verarbeiteten Elemente aus eloxiertem Aluminium. Ein hochwertiger Massivholz-Handlauf mit eingefasster Designleiste unterstreicht die hohe Produktqualität des Premium-Pflegebettes AURA.

Die Seitengitter sind beim AURA sehr dezent angebracht. Durch die Kombination von Holz und Aluminium strahlt es Wärme und Eleganz aus.“

Red Dot Design Award



Das vertikale Seitengitter verfügt über eine innovative und äußerst komfortable Einhandbedienung.

Das vertikale Seitengittersystem

Standardmäßig verfügt das AURA über die neue Version des vertikalen Seitengittersystems mit komfortabler Einhandbedienung.

Neben der Absicherung des Bewohners sind die kopfseitigen Elemente insbesondere als **Mobilisierungshilfe** (1) nutzbar. Der stabile Haltegriff bietet Hilfestellung beim Aufstehen oder zu Bett gehen. Die durchdachte Aufteilung von Liegefläche und Seitengittern erleichtert dem Bewohner den Übergang in die Ausstiegsposition.

In der **Ruheposition** (2) ist das Seitengitter abgesenkt und ermöglicht das bequeme Sitzen auf der Bettkante.

Die Position der erweiterten **Sturzprophylaxe** (3) wirkt einem unbewussten Herausrollen durch eine haptische Begrenzung der Liegefläche entgegen und bietet dem Personal Unterstützung bei der Umlagerung.

Auf maximale Höhe teleskopiert, ist eine vollständige **Besicherung** (4) des Bewohners möglich.

Prophylaxe zahlt sich aus



Demente, sturzgefährdete Bewohner erfordern besondere Aufmerksamkeit. Fehlende personelle Ressourcen werden oft als Argument für die Besicherung derartiger Risikogruppen mittels Seitengittern vorgebracht. Unser Ansatz ist es, durch Prophylaxe potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Für unsere Pflegebetten bieten wir sinnvolle Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen.

1. – Schutzmaßnahmen ergreifen

Die Funktion der erweiterten Sturzprophylaxe am vertikal versenkbaren Seitengitter, kann das Risiko unbewussten Herausrollens durch die haptische Begrenzung der Liegefläche reduzieren. Der Handlauf des Seitengitters bildet dabei eine wahrnehmbare Erhöhung am Rand der Matratze. Für die Bewohner ist diese jederzeit problemlos überwindbar.



Rechtzeitig zur Stelle:

Der Smart Nurse Assistant von Malsch informiert das Pflegepersonal, wenn ein Bewohner das Bett verlässt.




2. – Sturzrisiko minimieren

Das Pflegebett AURA verfügt über eine Niedrigposition zur Sturzprophylaxe, in der die Liegefläche bis auf eine Höhe von nur 25cm bzw. 26 cm (AURA LR) absenkbar ist. In dieser Position besteht, bei zusätzlicher Verwendung einer Sturzmatte vor dem Bett, ein deutlich reduziertes Verletzungsrisiko für den Bewohner im Falle eines Sturzes.

3. – Gefahren frühzeitig erkennen und melden

Der **Smart Nurse Assistant** stellt eine optionale Erweiterungsmöglichkeit für Malsch Pflegebetten dar. Das drahtlose System ist einfach zu handhaben und ermöglicht die Alarmierung der Pflegekraft über die bestehende Rufanlage oder diverse andere Kanäle, wenn ein Bewohner das Bett verlässt oder sich nach einer festgelegten Zeit nicht wieder im Bett einfindet.

Liegeflächen

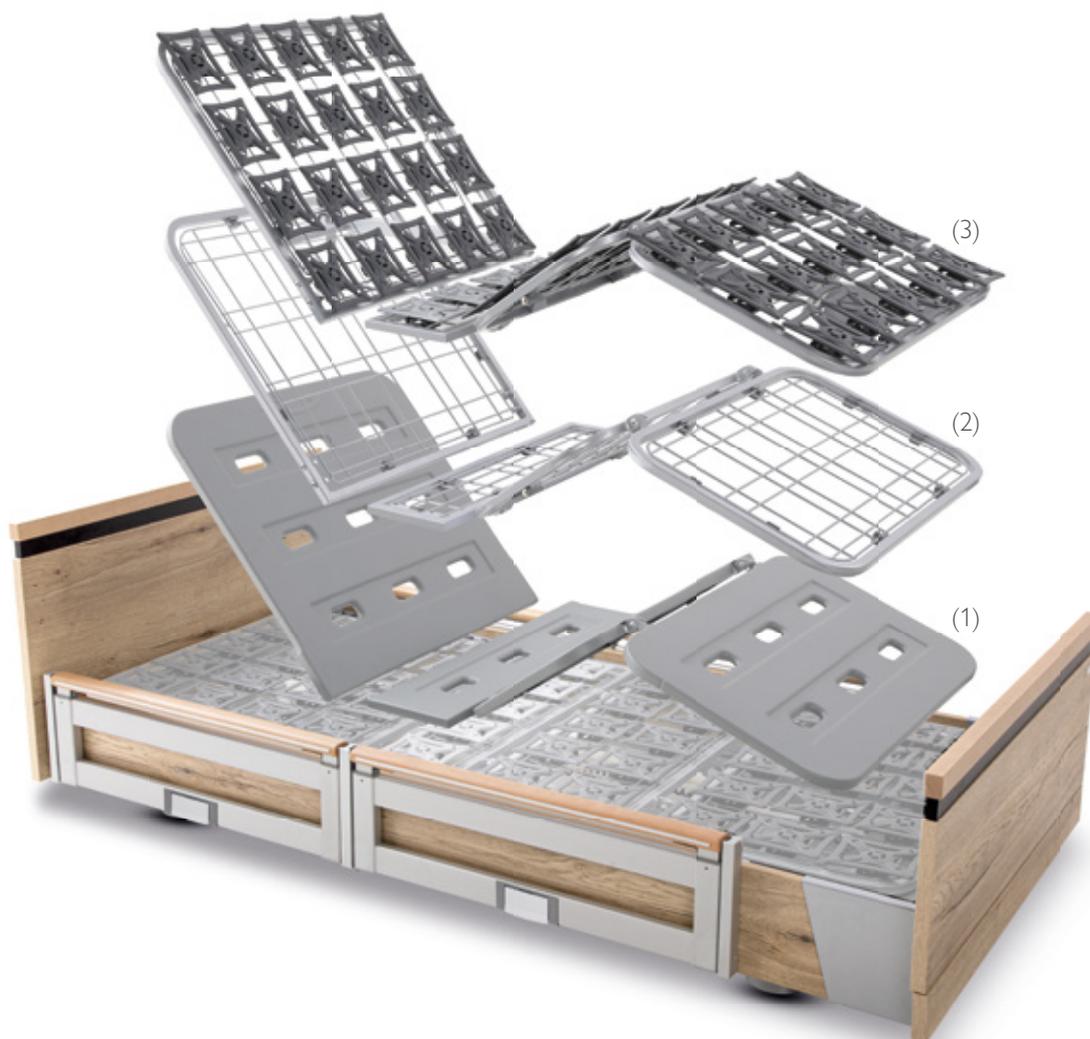

Die 4-geteilten Liegeflächen mit Matratzenausgleich bieten hervorragende Ergonomie und hohen Komfort. Der Rückzug der Rückenlehne im Verstellablauf wirkt dabei druckentlastend auf den Gesäßbereich.

Einfaches Handling und schnelle Reinigung der entnehmbaren Kunststoffauflagen bietet die **ABS-Liegefläche** (1).

Als Basisvariante verfügt die **Metallgitter-Liegefläche** (2) über hervorragende Belüftungseigenschaften und ermöglicht einen optimalen Feuchtigkeitstransfer.

Die flexiblen Federelemente der **Komfort-Liegefläche** (3) passen sich optimal an den Körper an und eignen sich zur Dekubitus-Prophylaxe.



Integrierte Bettverlängerung

Wechselnde Bewohner erfordern flexible Lösungen. Die integrierte Bettverlängerung ermöglicht auch großen Menschen optimalen Liegekomfort.

Mittels Schnellentriegelung ist die Liegefläche bei Bedarf sekundenschnell werkzeuglos erweiterbar. Im ausgezogenen Zustand bleiben alle Bettfunktionen uneingeschränkt nutzbar.

Das System ist in zwei Stufen um 10 cm oder 20 cm teleskopierbar und kommt dabei ohne zusätzliche Protpektoren aus. Bei der Verlängerung um 20 cm empfiehlt sich die Verwendung des optional erhältlichen Matratzeinlegers.



Abb. zeigt Ausführung Export



Das passende Bett für jede Anforderung



- Holzumbau Halifax Eiche natur
- Bettfronten V600, Inlay schwarz*
- integrierte Bettzeugablage*
- vertikal versenkbare Seitengitter mit Einhandbedienung, beidseitig geteilt, mit Massivholz-Handlauf

AURA

Das **preisgekrönte Niedrigpflegebett AURA** im klassischen Holzdekor bietet formschönes Design in Verbindung mit höchster Funktionalität. Die verdeckten Laufrollen mit Zentralbremse begünstigen den äußerst wohnlichen Charakter.

- Holzumbau Halifax Eiche natur
- Bettfronten V600, Inlay schwarz*
- vertikal versenkbare Seitengitter mit Einhandbedienung kopfseitig, mit Massivholz-Handlauf

AURA LR

Das **AURA LR** hat seine Stärken in der Mobilität. Mit lauffreudigen **100mm Doppelaufrollen** und Zentralbremse wird das Rangieren zum Kinderspiel.



Das AURA Niedrigpflegebett ist in den folgenden Seitengitterausführungen erhältlich:

- ohne Seitengitter
- vier Seitengitterelemente rundum
- Seitengitter kopfseitig als Mobilisierungshilfe

* optionale Sonderausstattung

AURA „Loft“

Das AURA im wohnlichen Design eines hochwertigen Polsterbettes. Mit der **aufwendigen Ledersteppung** ist das Niedrigpflegebett AURA in der Designvariante „Loft“ ein wahrer Blickfang. Hier trifft Funktionsvielfalt auf Extravaganz. Auch in der Variante AURA LR „Loft“ mit Doppelaufrollen und Zentralbremse sowie vertikalen Seitengittern erhältlich.



- Lederdesign Delius Solo 4551, Rautensteppung anthrazit
- Bettfronten V800

Die hochwertig verarbeitete Ledersteppung in der Designvariante „Loft“ ist in vielen Farbvarianten erhältlich (siehe Seite 21).



- Lederdesign Delius Solo 8551, Rautensteppung grau
- Bettfronten V850
- Vertikal versenkbares Seitengitter mit Einhandbedienung kopfseitig, mit Massivholz-Handlauf

Die dünnere Polsterung der Bettfront V850 lässt das AURA „Loft“ etwas zierlicher erscheinen. Die Seitengitter dienen bei dieser Ausführung als praktische Mobilisierungshilfe.



Integrierte Bettzeugablage

Praktisch, hygienisch und leicht bedienbar: die optional erhältliche Bettzeugablage erleichtert dem Pflegepersonal die Arbeit und vermeidet den Kontakt der Bettwäsche mit dem Fußboden.



Ausstattungen und Optionen

| | AURA | AURA LR |
|--|-------|---------|
| Niedrigposition | 25 cm | 26 cm |
| Arbeitshöhe | 82 cm | 82 cm |
| Sturzprophylaxe | • | • |
| Transferposition | • | • |
| Komfort-Sitzposition | • | • |
| Trendelenburg-Lagerung (sperrbar) | • | • |
| CPR-Notabsenkung | ◦ | ◦ |
| Matratzenausgleich der Rückenlehne | • | • |
| Bettverlängerung 10 cm/20 cm | • | • |
| Bettzeugablage | ◦ | ◦ |
| Doppelaufrollen | - | 100 mm |
| Verdeckte Laufrollen | • | - |
| Zentralbremse | • | • |
| Seitengitter EVGS (mit Einhandbedienung) | • | • |
| Antriebssystem mit Schutzkleinspannung | • | • |
| Handschalter mit Sperrfunktion | • | • |
| Unterbettbeleuchtung | ◦ | ◦ |

• Standard ◦ optional

Technische Angaben

| Maße und Gewichte | AURA/AURA LR | AURA „Loft“ |
|---------------------|--------------|-------------|
| Liegefläche | 90×200 cm | 90×200 cm |
| Außenmaße | 100×206 cm | 107×218 cm |
| Sichere Arbeitslast | max. 225 kg | max.225 kg |
| Unterfahrbarkeit | 13 cm | 13 cm |
| Gesamtgewicht | ca. 130 kg | ca. 130 kg |

Bettfronten

Die charakteristische AURA Bettfront mit farblich abgesetztem Inlay und Zierleiste am Fußende steht in offener oder geschlossener Variante zur Auswahl.



Auszug aus dem Zubehörsortiment



Aufrichter



Wandabweiser



Bettlampe Halolux LED



Nachtschrank WIII



Nachtschrank WIV



Server XL

Unser umfangreiches Zubehörsortiment finden Sie in einem gesonderten Katalog.

Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar per Post. Alternativ steht die PDF-Datei zum Download unter de.bettenmalsch.com/download bereit.



Holzreplikationen

Bei der Dekorauswahl handelt es sich um Reproduktionen. Farbverbindliche Dekorauswahl nur am Originalmuster möglich. Vorbehaltlich der Verwendung ähnlicher Alternativdekore anderer Hersteller bei Nichtverfügbarkeit oder Preisbindung. Weitere Dekore auf bettenmalsch.com



Aland Pinie polar H3433



Bavaria Buche H1511



Ellmau Buche H1582



Mandal Ahorn natur H3840




Kirschbaum Verona H1615



Locarno Kirschbaum H1636



Lyon Esche sandbeige H1298

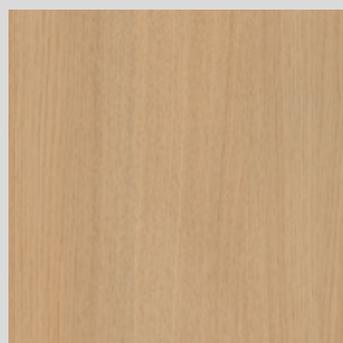

Sorano Eiche naturhell H1334



Lorenzo Eiche H3146



Halifax Eiche weiss H1176




Halifax Eiche natur H1180



Halifax Eiche tabak H1181

Farbverbindliche Leder-/Stoffauswahl nur am Originalmuster möglich. Vorbehaltlich der Verwendung ähnlicher Alternativstoffe anderer Hersteller bei Nichtverfügbarkeit oder Preisbindung.


Lederkollektion

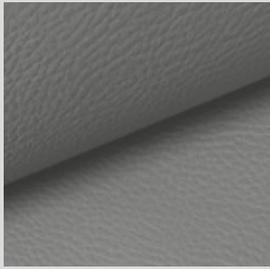


Solo Stein 8551




Solo Taupe 8552

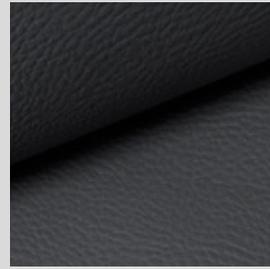

Solo Anthrazit 8553

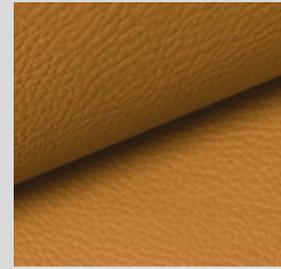

Solo Curry 2550

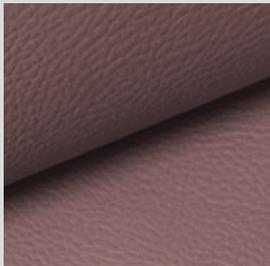

Solo Mauve 4550



Solo Violett 4551



Solo Blau 5550




Solo Rot 3552

Stoffkollektion



ASPEN Petal

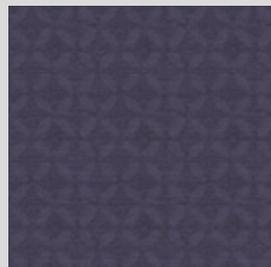

ASPEN Lavender



BLOSSOM Gooseberry



BLOSSOM Lake



CEDAR Almond



CEDAR Nutmeg



TRAX Black



TRAX Silver

Die Vielfalt an Holzdekoren oder Leder- und Stoffpolsterungen ermöglichen eine Bettgestaltung, die sich an individuellen Raumkonzepten orientiert. Die dargestellten Muster bilden einen kleinen Auszug unserer umfangreichen Kollektion.



„Das Durchschnittliche gibt der Welt
ihren Bestand, das Außergewöhnliche
ihren Wert.“

Oscar Wilde



malsch-individual.de

Betten Malsch GmbH

Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck

Tel.: +49 (0)6626 / 915 100

Fax: +49 (0)6626 / 915 116

E-Mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

