

medisun® 2800 Innovation

PROFESSIONELLE GANZKÖRPER-PHOTOTHERAPIE

**Die innovative
UV-Bestrahlungskabine
für die Behandlung
UV-sensitiver Hautkrankheiten**



medisun® 2800 Innovation

PROFESSIONELLE GANZKÖRPER-PHOTOTHERAPIE

medisun® 2800 Innovation ist eine UV-Bestrahlungskabine für die Behandlung UV-sensitiver Hautkrankheiten. Die Bedienung und Steuerung erfolgt durch einen integrierten 10,4“ Color-Touch-PC im Türmodul. Es können UVA-, UVB₃₁₁ – oder kombinierte Belichtungen durchgeführt werden. Die ergonomische Anordnung der UV-Lampen gewährleistet eine homogene Dosierung. Mit einem medisun Remote-PC (optional) ist eine komfortable und effiziente Bedienung, z. B. auch vom Empfang aus möglich. Der Türanschlag ist in Rechts- oder Links-Ausführung erhältlich.



HIGHLIGHTS

- 20, 24 oder 44 UV-Lampen à 100 Watt
- 180 cm Lampenlänge
- Mono oder Kombispektrum wählbar (UVB-311, UVA, UVA-1)
- Integrierte 10,4“ Color-Touch-PC Steuerung mit Dosisvorwahl in J/cm²
- Pausenfunktion beim Öffnen der Tür
- 2-fach Patientenbelüftung
- Redundante Echtzeit UV-Sensorik (2-fach UVA – 2-fach UVB-311)
- LC-Display mit Anzeige der verbleibenden Belichtungszeit im Innenraum
- Optimiertes Lampenlüftungssystem
- Acryl-Schutzscheiben vor den UV-Lampen
- Hochglanz-Lampenreflektoren
- Visuelle Patientenüberwachung
- Selbsttestdiagnosesystem
- Türanschlag rechts oder links
- 2 Haltegriffe für Patienten
- Stabiles Metallgehäuse mit Kunststoffbeschichtung
- Medisoft mit Remote-PC (optional)

**medisun® 2800 Innovation,
XXL-Variante**



Produktvideo unter
www.medisun.de

WIRKSAME BEHANDLUNG VON PSORIASIS, NEURODERMITIS, VITILIGO UND ANDEREN HAUTKRANKHEITEN

medisun® 2800 Innovation ermöglicht die sichere und effiziente Behandlung des ganzen Körpers mit komfortabler Bedienung. Es stehen zwei Gehäuseausführungen zur Verfügung, wahlweise mit dem Standardinnenraum von 72 x 72 cm oder in der großzügigen XXL-Ausführung mit 90 x 90 cm.







KURZE BELICHTUNGSZEITEN

Die hohe UV-Intensität der medisun® Therapie-Lampen sorgt für kurze Behandlungszeiten. Hochglanzreflektoren hinter den UV-Lampen optimieren den Wirkungsgrad.






Standardversion

XXL-Version

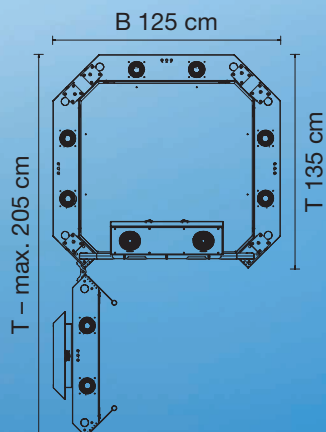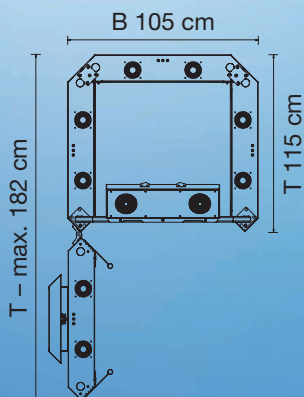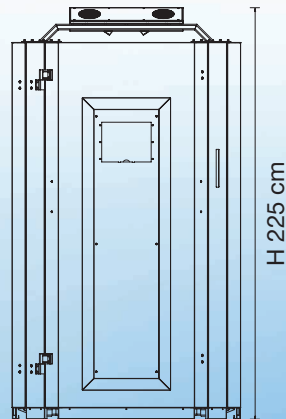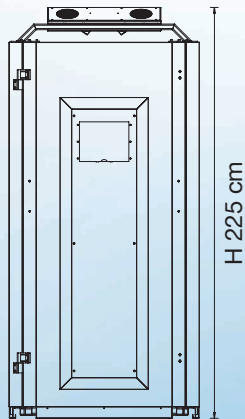

INDIKATIONEN

- Schuppenflechte (Psoriasis)
- Neurodermitis (atopische Dermatitis)
- PUVA-Therapie (Balneophototherapie)
- Weißfleckenkrankheit (Vitiligo)
- Polymorphe Lichtdermatose
- und weitere Hautkrankheiten

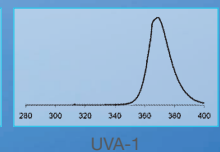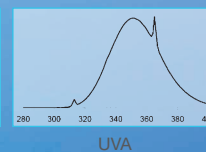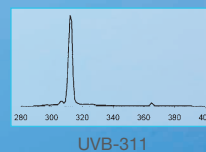

medisun® Color-Design

INDIVIDUELLE FARBAKZENTE IN ÜBER 80 FARBEN ERHÄLTlich

medisun® 2800 Innovation können Sie auf Wunsch mit Ihrer bevorzugten Farbapplikation passend zu Ihrem Klinik- oder Praxisambiente ohne Aufpreis bestellen!



TECHNISCHE DATEN

	BESCHREIBUNG	Art.-Nr.
ABMESSUNGEN	B 105 cm x T 115 cm x H 225 cm (Standard), Innenmaße 72 x 72 cm B 125 cm x T 135 cm x H 225 cm (XXL), Innenmaße 90 x 90 cm	
LEISTUNG	2,5 bis 5,0 kW	
GEWICHT	320 bis 400 kg	
NETZANSCHLUSS	400 V / 3 x 16 A (44 UV-Lampen) 230 V / 1 x 16 A (bis 24 UV-Lampen)	
VERSIONEN	24 A (UVA-Mono, 24-UV-Lampen, Touch-PC, 230 V)	Art.-Nr. 1802
	20 B (UVB ₃₁₁ -Mono, 20-UV-Lampen, Touch-PC, 230 V)	Art.-Nr. 1710
	44 A (UVA-Mono, 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7775
	44 B (UVB ₃₁₁ -Mono, 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7776
	44 AB (UVA/UVB ₃₁₁ , 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7777
	44 A XXL (UVA-Mono, 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7907
	44 B XXL (UVB ₃₁₁ -Mono, 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7908
	44 AB XXL (UVA/UVB ₃₁₁ , 44-UV-Lampen, Touch-PC, 400 V)	Art.-Nr. 7909
OPTIONAL	Permanent-UV-Messung (4-Sensoren) medisoft-Therapiemanagement-Paket	
ZERTIFIZIERUNG	CE 0197	
WEEE-REG.-NR.	DE 91065138	

Änderungen vorbehalten.