

Active®

by

ACCESS™



www.active-walker.com

Active walker - user manual

Active

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Sommaire | 6. Transport et montage |
| 2. Introduction | 7. Sécurité personnelle |
| 3. Description du produit | 8. Opération |
| 4. Entretien | 9. Spécificité |
| 5. Réglage pour optimiser le confort | 10. Accessoires |

Le déambulateur Active possède les meilleures spécificités techniques alliées à la facilité d'emploi et un design moderne. Le déambulateur est conçu pour aider l'utilisateur dans un certain nombre de tâches journalières telles que marcher et faire des courses.

L'Active est approprié pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur. Il possède des roues avant extra larges qui lui permettent de franchir des obstacles tels que des pas de porte et facilitent le passage de rebords.

Tous les déambulateurs Active sont fabriqués selon des normes de qualité et sont marqués CE en tant que dispositifs médicaux.

Le déambulateur Active est robuste et attrayant, avec un design scandinave; il est un compagnon utile et digne de confiance pour aider l'utilisateur à trouver la mobilité dont il a besoin.



- Le déambulateur doit être utilisé seulement pour aider à la mobilité.
- Assurez-vous que l'appareil est propre. Il peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge en utilisant un détergent doux, ainsi qu'avec un tuyau d'arrosage pour jardin ou un appareil haute pression.
- Vérifiez les pièces mobiles (par exemple, les roues ou les systèmes de réglage) régulièrement.
- Assurez-vous que les câbles de frein actionnés par la poignée ont été ajustés correctement. (Voir chapitre 8 : réglage des freins)
- Toutes les attaches (vis, écrous, boulons) devraient être vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'elles sont solidement serrées.
- Adressez vous à un revendeur compétent et autorisé pour tout entretien ou réparation de votre déambulateur.

CINQ

REGLAGE POUR OPTIMISER LE CONFORT



Système de réglage de la hauteur des poignées

Pour régler la hauteur des poignées du déambulateur, poussez le système de réglage tout en positionnant la poignée.

Quand la bonne position est sélectionnée, lâchez le système et abaissez la poignée jusqu'à ce qu'elle verrouille la position.

Répétez les mêmes opérations pour l'autre poignée.



Système de réglage de la hauteur du siège

Pour régler la hauteur du siège, tirez le système de réglage tout en ajustant la position du siège.

Lâchez le système afin de verrouiller le siège dans sa position.

Appuyez sur le siège pour s'assurer que les deux côtés de celui-ci sont fermement verrouillés avant de s'asseoir.

SIX

TRANSPORT ET MONTAGE



- Le déambulateur Active est livré assemblé et prêt à l'utilisation. Aucun outil est nécessaire.
- Pour replier le déambulateur pour le transport ou le stockage, tirez le levier vers le haut et tournez-le complètement jusqu'à ce que sa position se verrouille. Le déambulateur doit être comme sur la photo à gauche.
- Pour remettre l'appareil en position de marche, tourner le levier complètement jusqu'à l'arrêt.
- Manipulez le déambulateur avec précaution lorsque vous le placez ou le retirez du coffre de votre voiture



- Pour votre santé et votre confort, assurez vous de la bonne position à adopter et tenez le déambulateur de manière à pouvoir utiliser les freins avec facilité.
- Veuillez garder le déambulateur dans un environnement propre.
- Assurez-vous que le déambulateur déplié est bien en position verrouillée avant utilisation.
- Assurez vous que les roues sont stables et bien au sol avant utilisation.
- Assurez-vous que les freins fonctionnent correctement avant utilisation.
- Assurez-vous que le siège est en position verrouillée avant de vous asseoir.
- Veillez à vous asseoir toujours au centre du siège, positionné de sorte que vous ayez les pieds sur le sol.
- Veillez à toujours bloquer les freins de stationnement avant de vous asseoir.
- Ne jamais s'asseoir sur le déambulateur lorsqu'il est replié pour le rangement.
- Ne jamais se mettre debout sur le déambulateur ou l'utiliser comme un marche pieds.
- Ne pas transporter de personne sur le siège du déambulateur.
- Soyez prudent lorsque vous soulevez et portez le déambulateur.

HUIT

OPERATION

**Panier**

Afin d'accéder au panier, soulevez le siège vers le haut. Le panier peut être retiré pour porter des courses ou autre.

**Obstacles**

Le déambulateur est livré avec des roues avant de grand diamètre et un support de pied pour franchir les obstacles (comme un trottoir par exemple). Appuyez avec votre pied et tirer les poignées en même temps afin de soulever les roues avant pour passer les obstacles.


Les freins

Les freins sont une fonction essentielle de votre déambulateur Active. Il n'y a aucun câble de frein exposé, et le système breveté est à la fois plus sûr et exige moins d'entretien que beaucoup d'autres solutions.

Pour utiliser les freins, serrez simplement le levier de frein vers le haut avec la poignée. Seulement une traction légère est nécessaire, et les freins peuvent facilement être actionnés en variant la pression.

Pour bloquer les freins (et pour activer les freins de stationnement) veuillez abaisser simplement le levier de frein jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Pour débloquer les freins, tirez vers le haut le levier de frein et il retrouvera sa position neutre.

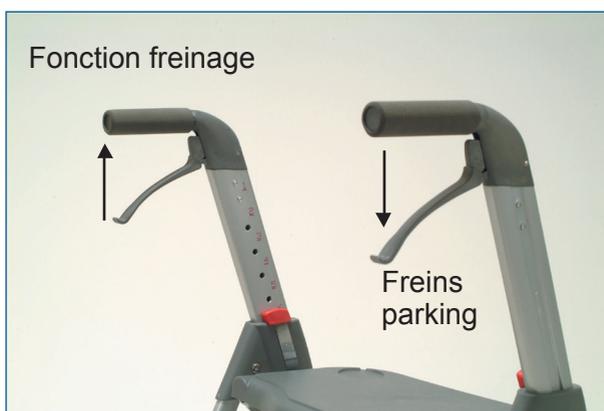

Entretien des freins

Le réglage des freins devrait être vérifié avant d'utiliser le déambulateur Active.

Des contrôles périodiques des fonctions de freinage doivent être faits afin de maintenir dans les meilleures conditions d'utilisation les freins et les pneus en raison notamment de leur usure normale pendant l'utilisation.

Il y a une vis de réglage située à l'intérieur du tube à l'arrière de l'appareil (voir la photo de droite).

Ajustez la vis de sorte que le câble de frein soit à 3 millimètres du pneu.

Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, serrez les freins.

La tourner en sens inverse relâche les freins.



NEUF

SPECIFICITES

Type	Active
Poids maximal de l'utilisateur	125 KG
Hauteur des poignées	79 - 100 cm
Dimension en cm (I/L)	60 x 72 cm
Dimension appareil replié	60 x 50 x 89 cm
Hauteur de siege	50 x 63 cm
Poids	9 KG
Matériau	Aluminium et fibre-renforcée plastique
Nettoyage	lavage au détergent ou à haute pression

DIX

ACCESSOIRES

Votre déambulateur peut être équipé d'accessoires en option afin de satisfaire vos besoins spécifiques.

Contactez votre distributeur pour le tarif et la disponibilité des pièces suivantes

- dossier pour siège - dossier capitonné qui s'attache au siège
- support de canne/béquille - pour porter une canne
- sac supplémentaire - fournit un espace supplémentaire pour porter vos courses
- porte-bouteille à oxygène - plusieurs tailles pour les bouteilles d'oxygène portables
- système de verrouillage de direction - bloque la rotation des fourches avant.
- Blocage du roulement - résistance variable sur les roues arrière, empêchement du roulement libre
- Skis - adaptateur avant de ski de roue pour l'usage dans la neige (maintient des roues)
- Coussins pour le siège et le dossier de siege- existe en 7 couleurs différentes

Pour plus d'informations sur votre Active walker, ses accessoires, et votre marchand local, voir www.active-walker.com