

UrgoTul®

Lite Border

DE EXTRA DÜNNER, ABSORBIERENDER
LIPIDOKOLLOID-GAZEWUNDVERBAND MIT HAFTRAND

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoTul® Lite Border ist ein selbsthaftender, absorbierender Lipidokolloid-Wundverband, der auf Basis der Lipidokolloid-Technologie (TLC = Technology Lipido Colloid), einer exklusiven und patentierten Innovation der Laboratoires URGO, entwickelt wurde.

UrgoTul® Lite Border setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- einer nicht haftenden Lipidokolloid-Matrix in direktem Kontakt mit der Wunde. Sie besteht aus einer Polyestermatrix, welche mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose) und Vaseline getränkt ist,
- einer dünnen, absorbierenden, nicht sensibilisierenden Komresse in der Mitte des Wundverbandes und
- einem weißen, schützenden Träger aus Polyurethan, der mit einer sehr gut hautverträglichen Klebmasse beschichtet ist.

EIGENSCHAFTEN

In Kontakt mit dem Wundexsudat nehmen die Hydrokolloidpartikel der Lipidokolloid-Matrix (TLC) eine gelartige Konsistenz an und bilden zusammen mit der Vaseline eine lipidokolloide Grenzschicht zwischen Wunde und Wundverband. Dadurch entsteht ein feuchtes Wundmilieu, welches den Heilungsprozess begünstigt.

Daraus ergeben sich folgende spezifische Eigenschaften:

- Aufrechterhaltung eines für die Wundheilung günstigen feuchten Wundmilieus,
- atraumatisches Ablösen zum Schutz der neugebildeten Gewebestrukturen,
- schmerzfreie Verbandwechsel für den Patienten und
- Schutz der Wundumgebung durch die hohe Hautverträglichkeit der Klebmasse.

Die absorbierende Komresse gewährleistet eine Drainage geringer Volumen an Wundexsudat und schützt so die Wundumgebung vor Mazerationen.

Das Trägermaterial ist flexibel und anpassungsfähig und passt sich somit an das anatomische Relief der Wunde an.

INDIKATIONEN

UrgoTul® Lite Border ist für die Behandlung akuter Wunden (z.B. traumatischer Wunden, Hautabschürfungen, postoperativer Wunden, Verbrennungen...) und chronischer Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera) in der Granulations- und Epithelisierungsphase geeignet.

HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

1. Vorbereitung der Wunde:

- Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen und mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Falls die Wunde zuvor mit einem Antiseptikum behandelt wurde, spülen Sie die Wunde vor der Anwendung von UrgoTul® Lite Border sorgfältig mit physiologischer Kochsalzlösung.

2. Anlegen des Wundverbandes:

- Ziehen Sie die Schutzfolien ab.
- Bringen Sie UrgoTul® Lite Border so auf die Wunde auf, dass die zentrale Komresse auf der Wunde positioniert ist.

3. Verbandwechsel:

- UrgoTul® Lite Border sollte in Abhängigkeit von der Exsudatmenge und dem klinischen Zustand der Wunde alle 2 bis 4 Tage gewechselt werden.
- UrgoTul® Lite Border kann bis zu 5 Tage auf die Wunde belassen werden.

VORSICHTMAßNAHMEN

- Bei klinischen Anzeichen einer lokalen Infektion kann die Behandlung nach Einschätzung durch den behandelnden Arzt auf einen antibakteriellen Wundverband umgestellt werden.

- UrgoTul® Lite Border darf nicht in einer Überdruckkammer verwendet werden.
- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt: die Wiederverwendung eines zum Einmalgebrauch bestimmten Wundverbandes kann Infektionsrisiken hervorrufen.
- (*) Vor der Anwendung die Umverehrtheit der sterilen Einzelverpackung überprüfen. Nicht anwenden, wenn diese beschädigt ist.
- Den Wundverband nicht erneut sterilisieren.

KONTRAINDIKATIONEN

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber dem Wundverband.

Vertrieb in Deutschland:

URGO GmbH; Justus-von-Liebig-Str. 16;
66280 Sulzbach



Made in France

Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 CHENOVE - France

CE 0459 (2008)



(2018-02)

STERILE R

