

## Verwendungshinweis – Safehip Active

---



Tytex A/S  
Industrivej 21, 7430 Ikast, Dänemark  
[www.tytex.com](http://www.tytex.com)

Kundenbetreuung

E-Mail: [customerservice@tytex.com](mailto:customerservice@tytex.com)

Europa: +45 9660 4200

Nord- und Lateinamerika: +1-855-569-6131

Hergestellt in der Slowakei

### Indikation

Medizinisches Produkt zur Vermeidung von Hüftfrakturen im Fall eines Sturzes.

### Eigenschaften

Der SAFEHIP<sup>®</sup> Active ist ein Hüftprotektorgurt mit integrierten Schutzelementen. Die hufeisenförmigen Elemente schützen den im Falle eines Sturzes betroffenen, kritischen Hüftbereich. Die Protektoren absorbieren die Energie und leiten sie aus dem kritischen Bereich ab, wodurch sie Schutz vor Hüftfrakturen bieten. Der Hüftprotektor wurde so entwickelt, dass die Elemente bereits beim Anlegen des Protektors (wie unten beschrieben) an der richtigen Stelle sitzen. Der Hüftprotektor besteht aus einem Abstandsgewebe, das Feuchtigkeit vom Körper weg transportiert und für hohen Tragekomfort sorgt.

Der SAFEHIP<sup>®</sup> Active eignet sich für die Verwendung während des Tages und kann über oder unter der Oberbekleidung getragen werden.

### Gebrauchsanweisung:

1. Am einfachsten lässt sich der Gurt im Stehen anlegen.
2. Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Gurt in die richtige Richtung zeigt. Dabei muss das offene Ende der hufeisenförmigen Elemente nach unten zu den Füßen zeigen.
3. Legen Sie den SAFEHIP<sup>®</sup> Active so an, dass beide Protektoren genau über dem kritischen Hüftbereich sitzen. Die Safehip-Elemente bilden nun einen Schutzring über die Knochenerhebungen wie in Abb. 1 dargestellt.
4. Schließen Sie den Klettverschluss an der Vorderseite und passen Sie den Sitz an. Der Gurt sollte so anliegen, dass er nicht am Körper verrutschen oder sich um ihn drehen kann. Wird er zu eng gestellt, schränkt er jedoch den Tragekomfort ein.
5. Sorgen Sie dafür, dass der SAFEHIP<sup>®</sup> Active mit seinen Protektoren wie in Abb. 1 veranschaulicht anliegt.
6. Es wird empfohlen, mehrmals am Tag den richtigen Sitz des SAFEHIP<sup>®</sup> Active hinsichtlich der hier beschriebenen Trageweise zu prüfen.
7. Sollten Sie sich unsicher sein, konsultieren Sie bitte einen Arzt oder eine Pflegefachkraft, die Ihnen beim Anlegen des Gurts helfen kann.

## Verwendungshinweis – Safehip Active

---



Diagram 1 / Figur 1 / Kuvan 1 / Abb. 1 / Figure 1 /  
Diagrama 1 / az 1. ábrának / Diagrama 1 / Rysunku 1

### **Vorsichtsmaßnahmen:**

Kein Hüftprotector kann alle Verletzungen durch Stürze zu einhundert Prozent verhindern; das Tragen des SAFEHIP<sup>®</sup> kann daher keinen Schutz vor Verletzungen garantieren. Es ist wichtig, dass beide Protectoren bei jeder Verwendung von SAFEHIP<sup>®</sup> richtig positioniert sind. SAFEHIP<sup>®</sup> ist auch nach mehreren Stürzen weiterhin einsetzbar. Wir empfehlen, das Produkt während des Gebrauchs regelmäßig auf Beschädigungen zu prüfen, insbesondere nach einem Sturz des Trägers. Ein beschädigter Hüftprotector darf nicht mehr getragen werden. Alle bleibenden Eindellungen gelten als Beschädigung. Wird der SAFEHIP<sup>®</sup> Active für sportliche Aktivitäten verwendet, bei denen ein Sturz ungleich größere Kräfte freisetzen würde, ist der durch den Protectorgurt gebotene Schutz möglicherweise zu gering und im schlimmsten Fall für die Vermeidung einer Fraktur nicht ausreichend.

SAFEHIP<sup>®</sup> darf nur wie vorgesehen als Hüftschutz verwendet werden. Ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt ist der Einsatz in Kombination mit anderen Medizinprodukten nicht zulässig. Bei unerwarteten Beschwerden oder Hautirritationen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder an Ihr Pflegepersonal.

### **Pflegehinweise:**

Der SAFEHIP<sup>®</sup> kann bei 40° C gewaschen und im Wäschetrockner getrocknet werden. Klettverschluss vor dem Waschen verschließen. Vor der ersten Verwendung sollte der SAFEHIP<sup>®</sup> Active gewaschen werden. Mit ähnlichen Farben und in einem Wäschenetz waschen. Der Gebrauch von chlorhaltiger Bleiche bzw. chlorhaltigem Desinfektionsmittel oder Waschpulver kann Lebensdauer und Funktion beeinträchtigen. Ist ein Desinfizieren des SAFEHIP<sup>®</sup> Active erforderlich, empfehlen wir die Verwendung von Virkon.